



# Slaugivita

## GAMINIO INSTRUKCIJA



### 1. Gaminio pavadinimas

Lenktos šviečiančio pluošto „šukos“

### 2. Gaminio kodas

19545

### 3. Spalva

Balta

### 4. Trumpas aprašymas

Lenktos medinės „šukos“, išlaikančios iki 200 šviečiančio pluošto gijų.

## 5. Turinys

- 1 x medinis apskritimo ketvirčio formos rėmas
- 4 x „L“ laikikliai

**Pastaba:** reikalingas šviečiantis pluoštas ir šviesos šaltinis, bet jie nėra komplektuojami.  
*Rekomenduojama 3 ilgių apsauginė grandinė, kuri taip pat nėra komplektuojama.*

## **6. „Snoezelen®“ stimuliacijos**

- Regėjimas

## **7. Geriausia naudoti**

Pasuktą 90 laipsnių kampu, tamsioje patalpoje.

## **8. Suderinami gaminiai**

19210 – Šviesos šaltinis

17905 – itin saugus plastikinis šviečiantis pluoštas 2 m x 100 gijų

17907 – itin saugus plastikinis šviečiantis pluoštas 2 m x 150 gijų

17908 – itin saugus plastikinis šviečiantis pluoštas 2 m x 200 gijų

19870 – itin saugus plastikinis šviečiantis pluoštas 3 m x 150 gijų

19871 – itin saugus plastikinis šviečiantis pluoštas 3 m x 200 gijų

17558 – ultravioletinis šviečiantis pluoštas 2 m x 100 gijų

siūlo keletą 1 m ilgio šviečiančio pluošto grandinių, bet jų negalima pakabinti ant „šukų“ rėmo.

## **9. Naudojimo pradžia**

- Įrenkite tinkamoje vietoje.
- Viršuje pastatykite šviesos šaltinį.
- Prie šviesos šaltinio pritvirtinkite šviečiantį pluoštą.
- Įjunkite šviesos šaltinį.

## **10. Išsamus aprašymas**

Lenktos medinės „šukos“, išlaikančios iki 200 šviečiančio pluošto gijų. Naudojamos kaip nuostabios užuolaidos. Galima tvirtinti prie tvirtų sienų. Šviečiantį pluoštą ir šviesos šaltinį reikia užsakyti atskirai.

## **11. Saugumas**

- Stebėkite šio gaminio naudojimą.
- Neleiskite pacientams traukti šviečiančio pluošto ar kabėti ant „šukų“. Šis gaminytis nepritaikytas išlaikyti paciento svorį.
- Prieš naudojimą įsitikinkite, kad gaminytis įrengtas saugiai.

## 12. Techniniai duomenys

Dydis: 122 x 122 cm  
Svoris: apytikriai 15 kg

## 13. Įrengimas


1. Pasirinkite tinkamą vietą ir įrenkite lenktas šviečiančio pluošto „šukas“.
  - Ganinį reikia įrengti dešiniajame kampe
  - Sienos, prie kurių bus tvirtinamos „šukos“, turi būti pakankamai tvirtos, kad išlaikytų gaminio svorį.
  - Gaminys sveria apytikriai 15 kg.
  - Gaminio matmenys: 122 cm x 122 cm.
  - Aukštis - neįrenkite „šukų“ per žemai, kad pacientai ir darbuotojai neužsigautų galvos ir niekam nekiltų noras užsikabinti už „šukų“; neįrenkite „šukų“ per žemai, kad nebūtų mindomas šviečiantis pluoštas.
  - Pasirinkite tinkamo ilgio šviečiantį pluoštą. Pluošto ilgis neturi būti per ilgas, kad gijos negulėtų ant grindų, ir ne per trumpas, kad būtų galima sukurti užuolaidos efektą.
  - Šviesos šaltinis turi būti įjungtas į netoliese esantį tinklo lizdą. Patikrinkite, ar laido ilgio pakanka iki tinklo lizdo.
  - Rekomenduojame naudoti „ROMPA®“ šviesos šaltinį, nes tik jis suteikia daugiausiai spalvų ir veikdamas neskleidžia šilumos. „šukos“ yra medinės, todėl saugu pastatyti „ROMPA®“ šviesos šaltinį, kai kitų šviesos šaltinių modelio naudojamos taškinės lempos naudojimo metu įkaista. Taip pat „ROMPA®“ šviesos šaltinį galima valdyti belaidžiu būdu, naudojant „ROMPA®“ „Wi-Fi“ ryšį.
  - Naudojamas šviesos šaltinis suteikia šukoms papildomo svorio, todėl dar kartą patikrinkite, ar pridedami tvirtinimo elementai atitinka sienos konstrukciją.
2. Prieš tvirtinant „šukas“ prie sienos rekomenduojama jas padėti ant grindų. Ant „šukų“ pastatykite šviesos šaltinį ir pabandykite surasti tinkamiausią vietą šviesos šaltiniui. Jei šviesos šaltinis yra centre, gijos atrodys ilgesnės prieš „šukas“ esančiame dešiniajame kampe ir trumpesnės artimesniuose kampuose kaip matyti dešinėje esančiame paveikslėlyje. Šviesos šaltinį galima įrengti vienoje pusėje, kad šviečiančio pluošto gijos viename „šukų“ kampe atrodytų ilgesnės/trumpesnės. Išbandykite įvairius variantus ir suraskite geriausią vietą šviesos šaltiniui. Šviesos šaltinį galima tvirtinti apačioje, kad judančios gijos negalėtų jo pajudinti.



3. Kai surasite vietą šviesos šaltiniui, atsargiai perkiškite pluošto gijas per „šukose“ esančias angas. „Šukose“ iš viso yra apie 100 angų, o kiekvieną jų yra pakankamai didelė, kad būtų galima perkišti ne vieną giją.
4. Naudodami atitinkamus tvirtinimo elementus pritvirtinkite plokšteles prie medžio (po dvi tiesioje pusėje). Plokštelė turi būti medinių „šukų“ apačioje, kad prilaikytų „šukas“, o ne kabėtų ant jų. Medinėse „šukose“ nėra iš anksto išgręžtų angų, todėl plokštelių padėtis galėsite nustatyti atsižvelgdami į sieną.
5. Patikrinkite, ar sienos vietoje, kur ketinate tvirtinti plokšteles, nėra vamzdžių, el. laidų ir pan. Sienoje išgręžkite angą, kurioje įstatysite kaištį. Per plokštelę į kaištį įsukite atitinkamą varžtą. Patikrinkite, ar plokštelės pritvirtintos patikimai.



Pavyzdžiai:

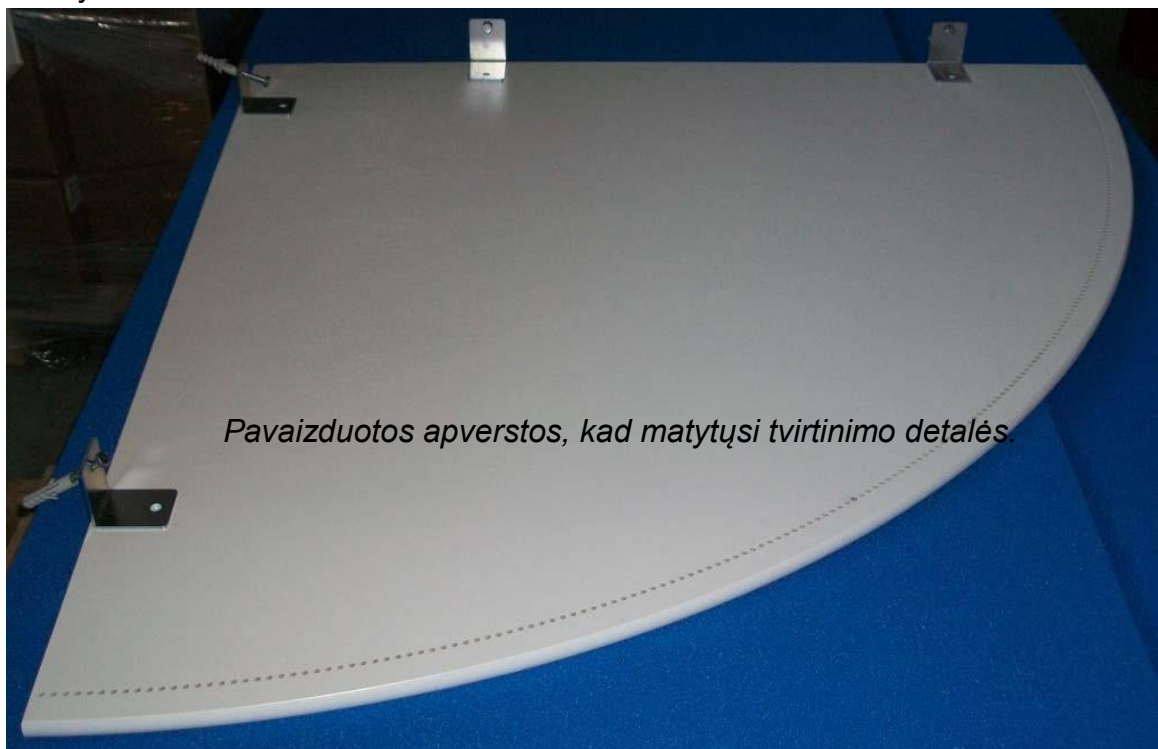

*Pavaizduotos apverstos, kad matytųsi tvirtinimo detalės.*



*Plokštelės turi būti tokioje padėtyje, kaip pavaizduota - medinių „šukų“ apačioje, kad prilaikytų „šukas“, o ne kabėtų ant jų.*

6. Pritvirtinkite apsaugines grandines: vieną galą pritvirtinkite prie „šukų“, o kitą prie lubų. Šias grandines naudoti būtina. Jei staiga „šukos“ būtų patrauktos nuo lubų, apsauginės grandinės sulaikys „šukas“ ir neleis joms nukristi. Pasirinkite tinkamą grandinių ilgį, atsižvelkite į jų tvirtinimo vietą lubose ir šviesos šaltinio vietą.
7. Apsvarstykite galimybę sienoje pritvirtinti laikiklius, kurie laikytų užolaidą atvertą ir apsaugotų šviečiančio pluošto gijas, kai kambarys nėra naudojamas.
8. Kai gaminys pritvirtintas, įjunkite šviesos šaltinį. Vadovaukitės šviesos šaltinio ir šviečiančio pluošto instrukcijomis.

## **14. Priežiūra**

- Draudžiama panardinti į vandenį.
- Gijas ir medį valykite švaria šluoste, nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.

## **15. Trikčių diagnostika**

*Netaikoma*

Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš [www.rompa.com](http://www.rompa.com).

Tikimės, kad instrukcijose rasite naudingos informacijos. Jei turite pasiūlymų dėl gaminio tobulinimo, mielai laukiame jūsų komentarų. Rašykite mums el. paštu [producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)

Įrengimo pavadinimas: **Lenkto šviečiančio pluošto šukos**

Modelis:

Serijos Nr. \_\_\_\_\_

Pardavimo data: PVM Sąskaitos-faktūros Nr.:

Pardavėjo pavardė \_\_\_\_\_ Parašas \_\_\_\_\_

**A.V.**

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama **12 mėnesių** garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

**Garantija netaikoma:**

**Netinkamos priežiūros atveju** : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

**Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju**: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

**Modifikacijos atveju**: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

**Kitais atvejais**: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apiejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

**Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.**

**Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.**

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas \_\_\_\_\_

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

**1. Gedimas** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)

**2. Gedimas** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)