



Slaugivita

ROMPA®



1. Gaminio pavadinimas

Projektorius „Žvaigždėtas dangus“

2. Gaminio kodas _19908

3. Spalva Sidabrinė ir juoda

4. Trumpas aprašymas

Nereikia laukti nakties norint pamatyti nuostabų žvaigždėtą dangų! Apšviestas, mirgantis, nuostabus žvaigždžių spektaklis!

5. Turinys

- 1 x projektorius
- 1 x KS adapteris

6. „Snoezelen®“ stimuliacijos

- Regėjimas

7. Geriausia naudoti

Ant lygaus ir stabilaus paviršiaus tamsioje patalpoje.

8. Suderinami „ROMPA®“ gaminiai

Žvaigždėto dangaus projektorius priedų neturi. Tačiau, tęsiant žvaigždėto dangaus temą, jus gali sudominti šie gaminiai:

19210 – šviesos šaltinis „ROMPA®“ ir 14726 – kilimas „Paukščių takas“

18544 – „ROMPA®“ fejerverkų skydas

17637 – švytintis žvaigždėtos nakties audinys

16293 – švytinčios žvaigždės ir 19645 – švytinti saulės sistema

9. Naudojimo pradžia

- Suraskite tinkamą vietą.
- Įjunkite, tada sureguliuokite kampą ir ryškumą.

10. Išsamus aprašymas

Nereikia laukti nakties norint pamatyti nuostabų žvaigždėtą dangų! Apšviestas, mirgantis, nuostabus žvaigždžių spektaklis! Kompaktiškas ir apima visas lubas. Puikiai tinka naudoti namuose. Galima tvirtinti prie sienos. Turi KS adapterį.

VEIKIMAS

Norėdami naudoti ĮJUNKITE, o baigę – IŠJUNKITE.

Šis projektorius sukuria tūkstančius žvaigždžių su debesimis arba be jų.

Norėdami reguliuoti debesų ryškumą, sukite projektoriaus nugarėlėje esantį ratuką.

Norėdami reguliuoti kampą, pasukite projektorių švelniai laikydami už pagrindo.

Ilgiausiai nepertraukiamai galima naudoti dvi valandas. Korpusas yra plastikinis ir nepritaikytas veikti nepertraukiamai.

SVARBU

Žvaigždėto dangaus projektorius išskiria dalį „ROMPA®“ projektorių energijos, pvz., ROMPA® Super Solar 100C. Todėl suprojektuotas efektas nebus toks dramatiškas nei projektuotas naudojant „ROMPA®“ projektorius. Taip pat šis projektorius yra mažesnis už „ROMPA® Super Solar 100C“. „ROMPA®“ projektoriaus priedai, pvz., efektų ratai, sukurkite asmeninio efekto ratus, ratų rotatoriai, kasetės ir pan., nėra suderinami su šiuo gaminiu. Žvaigždėto dangaus projektorius puikiai tinka mažuose kambariuose (pvz., miegamuosiuose) ir reikalauja mažiau biudžeto bei puikiai tinka tiems, kurie pageidauja abstraktesnių projekcijų, o ne sudėtingų „ROMPA®“ efekto ratų.

11. Saugumas

- Stebėkite šio gaminio naudojimą.
- Baigę naudotis išjunkite ir leiskite atvėsti prieš padėdami į laikymo vietą.
- Naudoti tik viduje.
- Gaminio naudojimas turi būti prižiūrimas.
- Šis gaminys nėra žaislas ir negali būti naudojamas kaip žaislas.
- Naudojimo metu projektorius įkaista.
- Draudžiama projektoriaus objektyvą nukreipti į žmogaus veidą.

12. Techniniai duomenys

Dydis: 28 x 24 x 21 cm
(ovalus pagrindas = 24,5 cm ilgio x 21 cm pločio; bendras aukštis: apie 28 cm)

KS adapteris: Įvadas: 240 V ~ 50 Hz 60 mA
Išvadas: 6 V ~ 1200 mA

Naudoti tik viduje

Projektorius: Plastikais

2 klasės LED gaminys

Didž. išvesties galia <10,97 mW

Bangos ilgis: 450 – 465 nm

1 klasės lazerinis gaminys

Atitinka EN60825-1 : 1994+A1 : 2002+A2:2001

Įmontuoti du tikslūs stikliniai objektyvai

13. Montavimas

1. Projektorių pastatykite patalpoje ant lygaus, stabilaus ir tinkamo paviršiaus. Eksperimentuokite ir suraskite projektoriui geriausią vietą. Atsižvelkite į šią informaciją:
 - naudoti tik patalpoje
 - vieta prie tinklo lizdo; adapterio laido ilgis = 180 cm
 - projektoriaus dydis
 - kuo didesnis atstumas, tuo didesnis ir geresnis efektas
 - kuo tamsesnis kambarys ir šviesesnės sienos/lubos, tuo geresnis efektas
 - galima žiūrėti į suprojektuotą efektą, tačiau draudžiama žiūrėti tiesiai į projektorių; pasirūpinkite, kad jis būtų pakankamai aukštai
 - projektoriaus svoris – apie 1,8 kg
 - pasirūpinkite, kad tarp projektoriaus ir sienos nebūtų kliūčių, taip pat venkite siluetų!
 - apie adapterį ir projektorių turi laisvai cirkuliuoti oras, nes naudojimo metu projektorius įkaistas; jokia būdu nestatykite šalia greitai užsidegančių daiktų
 - galbūt ON/OFF jungiklį norėsite naudoti dažnai
 - pagrindo apačioje yra keturios pagalvėlės, skirtos apsaugoti paviršių; taip pat yra keturios angos, skirtos tvirtinti pagrindą prie sienos
2. Prie projektoriaus prijunkite apvalų maitinimo laido kištuką; projektoriaus viršuje yra apvalus lizdas. Prijunkite ir įjunkite į tinklo lizdą. **Atminkite:**
Šiam gaminiui reikia 13 A lizdo, o ne saugikliu perjungiamos atšakos. Žvaigždžių projektorius apatinėje dalyje yra mažas ON/OFF (maitinimo) mygtukas (sukamas jungiklis). Įjunkite.

14. Priežiūra

- Norėdami nuvalyti pirmiausiai išjunkite iš tinklo lizdo ir leiskite atvėsti. Projektoriaus išorę valykite švariu, šiek tiek drėgnu audiniu.
- Naudoti nebetinkamą gaminį būtina utilizuoti laikantis galiojančių įstatymų.
- Lempučių keisti nereikia, nes naudojami LED diodai.

15. Trikčių diagnostika

Netaikoma

Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš www.rompa.com.
Tikimės, kad čia rasite naudingos informacijos. Jei turite pasiūlymų dėl gaminio tobulinimo, mielai laukiame jūsų komentarų. Kreipkitės į mus producthelp@rompa.com.

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: **Projektorius šviesos terapijai „Žvaigždėtas dangus“**

Modelis: 19908

Serijos Nr. _____

Pardavimo data:

PVM Sąskaitos-faktūros **SLS** Nr.:

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

A.V.

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama **12 mėnesių** garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio(įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys(įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį(įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys(įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo(potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

1. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)

2. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)