



GAMINIO INSTRUKCIJA



Slaugivita

„OASIS“ difuzorius aromaterapijai su garsais

1. Gaminio pavadinimas

Projektorius *Aura*

2. Gaminio kodas

21507

3. Spalva

Kaip pavaizduota

4. Trumpas aprašymas

Tobulas projektorius namams. Aukšta kokybė ir specialiai miegamiesiems pritaikytas ryškumas.

5. Komplektą sudaro:

- 1 projektorius *Aura*
- 1 maitinimo šaltinis
- 1 efektų diskas (dizainas gali skirtis)
- 1 stalo stovas (putplasčio žiedas)
- 1 tvirtinimo prie sienos laikiklis (su tvirtinimo elementais)

6. **Snoezelen® stimuliacijos**

- Regėjimas

7. **Geriausia naudoti**

patalpoje, pritemdytoje aplinkoje. Projektuokite ant plokščio, balto arba blankios spalvos ir lygaus paviršiaus. Šis projektorius puikiai tinka naudoti mažose patalpose. Naudokite komplekte esantį efektų diską.

8. **Suderinami ROMPA® gaminiai**

Šis projektorius gali būti naudojamas su dauguma *ROMPA®* siūlomų efektų diskų, įskaitant abstrakčius diskus su skysčiu, teminius diskus arba efektų diskus su nuotraukomis. Visas efektų diskų pasirinkimas pateiktas www.rompa.com.

9. **Naudojimo pradžia**

- Sumontuokite projektorį.
- Įstatykite efekto diską (savo pačių sukurtiems diskams nuimkite magnetinį adapterį).
- Prijunkite maitinimo šaltinį.

10. **Išsamus aprašymas**

Tobulas projektorius namams. Aukštos kokybės, ryškumas specialiai pritaikytas miegamiesiems (*LED100* ir *LED* projektoriai yra ryškesni multisensorinėms *Snoezelen®* aplinkoms). Funkcijos:

- laikmatis;
- pritemdymo valdymas;
- šviesos diodas, todėl nereikia keisti lemputės ir nekaista;
- suderinamas su mūsų plačia efektų diskų serija;
- yra diskas su skysčiu (neapibūdinamas);
- sumontuotas disko sukimo mechanizmas.

Nesuderinamas su panoraminiu sukimo prietaisu, iškraipymo disku, prizmės adapteriu, kelių briaunų veidrodžiu arba *ROMPA®* belaidžio ryšio gaminiais.

11. **Sauga**

- Visada prižiūrėkite šio gaminio naudojimą.
- Montuokite sausoje patalpoje.
- Jeigu numetėte projektorį arba yra pažeistas maitinimo laidas, nenaudokite šio

projektoriaus.

12. Techniniai duomenys

Maitinimas:	9 V KS6 W
Dydis:	20 x 20 x 20 cm
Svoris:	889g


13. Montavimas

1. Pasirinkite tinkamą projektoriui vietą, įsitinkite, kad neužkliūsite už maitinimo laido, jo nepatrauksite arba jis nesilies su karštais paviršiais. Jeigu reikia naudoti maitinimo laido ilgintuvą, turi būti naudojamas toks laidas, kurio srovės stiprumas ne mažesnis už prietaiso maitinimo laido. Laidas, skirtas mažesniai srovės stiprumui, nei prietaisas, gali perkaisti.
2. Projektorių sumontuokite naudodami komplekte esantį stalo stovą (putplasčio žiedas)




arba tvirtinimo prie sienos laikiklį. Tvirtinimo prie sienos laikiklis turi būti prisuktas prie sienos vertikaliaje padėtyje, kad prilaikytų projektoriaus apatinę ir viršutinę dalis. Tvirtinimo elementai pateikiami komplekte.

Atsiminkite: kai tvirtinate prie sienos, prie projektoriaus pritvirtinkite apsauginį troselį. Tam, prie projektoriaus šono pritvirtinkite apsauginio troselio spyruoklinę apkabą.

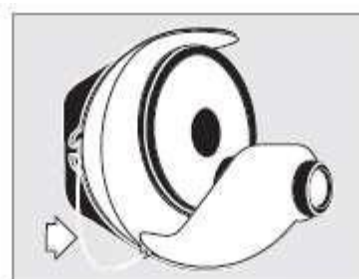


3. Įstatykite komplekte esantį efektų diską. Jis turi magnetinį priedą – magnetinio adapterio kairėje esantis šliaužiklis turi būti viršuje, kaip parodyta iliustracijoje. Magnetinį diską uždėkite ant projektoriaus magnetinio adapterio. Norėdami nuimti diską, tiesiog jį pakelkite.

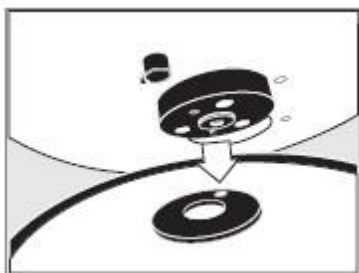

4. Norėdami naudoti standartinius ROMPA® efektų diskus su šiuo projektoriumi, pirmiausiai iš projektoriaus išimkite magnetinį adapterį. Tam naudokite komplekte esantį mažą šešiakampį raktelį, kurį įstatykite į magnetinio adapterio viršuje esančią angą. Šešiakampį raktelį sukite prieš laikrodžio rodyklę. Adapteris atsilaisvins ir atsiskirs nuo projektoriaus.


Atkreipkite dėmesį: norint pasukti pasukimo prietaisą, gali reikėti įjungti projektorių. Magnetinio adapterio viršuje esanti anga turi būti nukreipta į projektoriaus viršų.

Norėdami atgal uždėti magnetinį adapterį, įsitinkite, kad plokščia ašelės dalis yra nukreipta į projektoriaus viršų. Uždėkite magnetinį adapterį ant ašelės, šešiakampį raktelį įstatykite į magnetinio adapterio angą ir

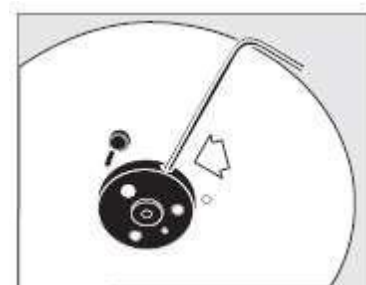

sukite jį pagal laikrodžio rodyklę. Adapteris palaipsniui bus priveržtas ir prijungtas prie projektoriaus.


Nuėmus magnetinį adapterį, uždėkite diską ant disko sukimo prietaiso, kaip parodyta. Plastikinio išgaubto užspaudžiamo disko uždėjimą palengvinsite šiek tiek pasukdami efekto diską.

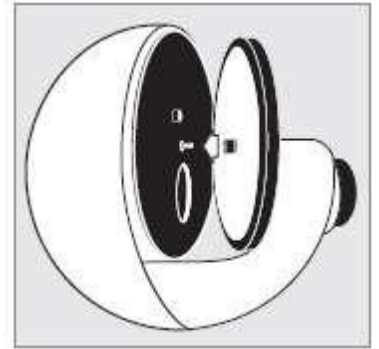

Norėdami pritvirtinti išgaubtą stiklinį efektų diską (pvz., diskai su skysčiu), priveržkite disko sukimo prietaiso ašelės sraigta (kryžminė galvutė).


Sraigtas turi būti sulygintas su plokščia ašelės dalimi.

Norėdami nuimti išgaubtą užspaudžiamą efektų diską, atsukite diską, jeigu jis turi sraigta (pvz., diskas su skysčiu) ir įsitikinkite, kad diskas yra tiesus ir vertikaliajoje padėtyje. Tada abejomis rankomis nuimkite diską nuo ašelės.

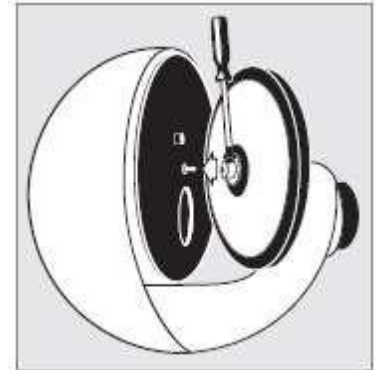


5. Maitinimo šaltinį prijunkite prie projektoriaus dešinėje esančio įėjimo lizdo. Įjungus maitinimą, įsijungs projektorius.

6. Norėdami sufokusuoti projektoriaus projektuojamą vaizdą, pasukite lęšio šliaužiklį pirmyn arba atgal iki gausite norimą vaizdą,

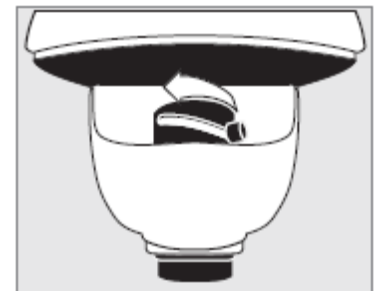

7. Didžiausias projektuojamas vaizdas turi būti ne didesnis kaip 4 m skersmens.

8. Norėdami išjungti projektorių be programos, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę „DIM – OFF – TIMER“ (pritemdymas - išjungimas - laikmatis) mygtuką iki išsijungs šviesos.

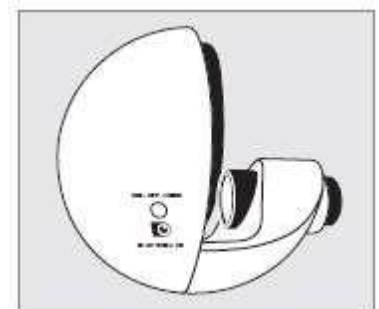

9. Norėdami pritemdyti vaizdą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę „DIM – OFF – TIMER“ (pritemdymas - išjungimas - laikmatis) mygtuką iki pasieksite norimą šviesos lygį. **Atsiminkite:** prietaisas gali pradėti veikti po 15 minučių, nes diskuose su skysčiu yra alyva, kuri sušilus pradeda laisvai tekėti. Alyva šyla nuo projektoriaus skleidžiamos šilumos.

10. Laikmačio funkcija puikiai tinka asmenims, kurie nori, kad projektorius automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko. Įjunkite projektorių ir palaukite 10 sekundžių. Norėdami paleisti laikmatį, dukart nuspauskite „DIM – OFF – TIMER“ (pritemdymas - išjungimas - laikmatis) mygtuką. Kad laikmatis įsijungtų,

rodo mirksinti lemputė. Laikmatis automatiškai nustatomas 30 minučių, po to projektorius pritemsta ir išsijungia.

11. Atkreipkite dėmesį, kad greitai bus pateikta nemokama programėlė, kuri dar labiau palengvins valdymą!

Šis projektorius nėra ROMPA® belaidžių produktų serijos dalis, todėl jis negali būti valdomas naudojant ROMPA® belaidžio ryšio valdiklius, kaip 8 spalvų belaidį valdiklį.

14. Priežiūra

- Naudokite ir saugokite tik sausoje ir vidutinės temperatūros aplinkoje. Venkite per didelio karščio, drėgmės, dulkių ir vibracijų.
- Prieš valymą ir techninės priežiūros atlikimą, atjunkite maitinimą.
- Nebandykite ardyti projektoriaus.
- Fokusavimo lęšio valymui naudokite minkštą audinį, bei šiek tiek denatūruoto spirito arba gryno alkoholio.
- Nebandykite patys atlikti šio projektoriaus techninės priežiūros, nebent tam turite kvalifikaciją ir dirbate gavę gamintojo leidimą.
- Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite kištuką. Atjungdami nuo maitinimo tinklo, netraukite už laido arba projektoriaus.



15. Trikčių diagnostika

Netaikoma.

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: **Projektorius Aura**

Modelis: 21508

Serijos Nr. _____

Pardavimo data:

PVM Sąskaitos-faktūros **SLS** Nr.:

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

A.V.

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama **12 mėnesių** garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims.

Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

1. Gedimas _____

—

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)

2. Gedimas _____

—

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)