

Drošības ieteikumi

#	Pārbaudīt	Drošības ieteikumi
1	Lietojot pacientu nostiprināšanas siksnas, gulta ir jānodrošina ar sānu margām.	Margas vienmēr JĀPACEĻ un JĀNOFIKSĒ.
2	Vienmēr lietojiet pie gultas esošas sānu jostas, ka pacients neizkrīstu.	NEKAD nedrīkst lietot siksnu bez sānu jostām.
3	Pārliecinieties, ka pie gultas piestiprinātas siksnas, jostas vai citi turētāji netraucē citām gultas mobilajām daļām.	PIRMS sākat lietot gultu, uzmanīgi pārbaudiet tās funkcionalitāti, lai izvairītos no nopietnas ievainošanas.
4	Pārliecinieties, ka siksnas un citi turētāji ir pareizi piestiprināti pie gultas.	NEPIECIEŠAMS ļoti stingri nostiprināt siksnas un to turētājus.
5	Pārliecinieties, ka pacienta ekstremitātes atrodas gultas robežās, lai izvairītos no ievainošanas (gan pacienta, gan personāla ziņā).	Attālumam starp pacienta ekstremitātēm un gultas malas jābūt vismaz 5 cm. Dotā prasība nodrošina pacienta un personāla drošību.
6	Gultām bez sānu rokturiem lietojiet 3 vai 5 punktu nostiprināšanas sistēmas.	3 punkti ieslēpi = vidukļa sikсна + labās plaukstas pamats + kreisā kājas potīte 5 punkti = vidukļa sikсна + 2 plaukstu pamats + 2 kāju potītes
7	„Salvafix“ nelietojiet, ja neesat pareizi apmācīti.	Par apmācībām griežieties pie ražotāja pilnvarota pārstāvja.
8	Vienmēr ievērojiet savas institūcijas darba protokolu.	Nelietojiet nostiprināšanas sistēmas, ja Jūsu institūcijai nav attiecīga darba protokola.
9	Ievērojiet valsts un vietējas likumdošanas un pārējos juridiskos noteikumus, kas tiek piemēroti pacientu nostiprināšanas sistēmām.	Tas jāievēro VIENMĒR.
10	Nostiprināšanas sistēmas var lietot tikai pēc ārsta ieteikumiem	VIENMĒR
11	Produkta izmēra jāpiemēro atbilstoši pacienta augumam un ķermeņa izmēram.	Skatīt „Salvafix“ izmēru tabulā.
12	Vidukļa sikсна jāpiemēro pēc pacienta izmēra.	Iebāziet plaukstu starp pacienta vidukļa un siksnas, lai pārbaudītu siksnas izmēru.
13	Piestiprināti pacienti pastāvīgi jāuzrauga.	Ievērojiet savas instrukcijas darba protokolā.
14	Jostas nedrīkst piestiprināt pie gultas asām daļām.	Uzmanīgi pārbaudiet.
15	Blakus pacientiem ar sirds stimulatoriem nelietojiet magnētiskās atslēgas.	Drošs attālums starp sirds stimulatora un magnētiskās atslēgas ir 15 cm.
16	Pārbaudiet siksnu daļas ar lipekļiem un pārliecinieties, ka lipekļi darbojas pareizi.	Ar suku regulāri iztīriet siksnu lipekļus un pārliecinieties, vai lipekļi labi pielīp.
17	Vienmēr netālu turiet šķēres, ka ekstremālajā gadījumā varētu siksna un jostas nogriezt.	Ekstremālajā gadījumā siksna un jostas nogriežiet.
18	Ja fiksācijas sistēma tika nobloķēta un nav iespējas atbrīvot pacientu...	siksna vai jostas jānogriež.
19	Blakus pacientam nenolieciet nekādus bīstamus priekšmetus.	Šķiltavas, atslēgas, rotaslietas, asus priekšmetus u.c. blakus pacientam nedrīkst nolikt.
20	Izstrādājumi nav ugunsdroši, tāpēc tiem blakus nedrīkst smēķēt un novietot citus uguns avotus.	Uzmanīgi pārbaudiet.
21	Pirms nostiprināšanas sistēmu mazgāšanas / žāvēšanas, izņemiet visas magnētiskās pogas un to spraudes.	Uzmanīgi pārbaudiet.
22	Piestiprināšanas sistēmas daļas mazgājiet un žāvējiet mazgāšanas maisiņā.	Maisiņš pagarina siksnas lietošanas laiku.
23	Pirms sākat lietot, pārbaudiet slēdžus un spraudes.	Atbilstoši dotā dokumenta ieteikumiem.
24	Pirms sākat lietot, pārbaudiet nostiprināšanas siksnas un jostas.	Atbilstoši dotā dokumenta ieteikumiem.
25	Ja izlasot šīs instrukcijas nav skaidrs, kā lietot nostiprināšanas sistēmu, to NELIETOJĒT .	NELIETOJĒT un sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.
26	Slēdži un spraudes jebkurā brīdī var sabojāties.	Pirms sākat lietot, uzmanīgi pārbaudiet slēdžus un spraudes.
27	Pārbaudot slēdžus, ievērojiet dotajā dokumentā norādītus pārbaudes ieteikumus.	Uzmanīgi izpildiet.
28	Gultu neregulējiet viszemākajā pozīcijā.	Ja pacients gribēs izkāpt no gultas, viszemākā

		pozīcija aizsargās no ievainošanās.
29	Bridinājums!	Nepareiza SALVAFIX sistēmas lietošana var ietekmēt pacientu ievainošanu vai spontānu nožņaugšanos.
30	Plaukstu pamata un kāju potīšu jostas jānostiprina pareizi.	Nevajag pārāk daudz atbrīvot vai savilkt.
31	Slēdža pogas nedrīkst samitrināt vai iemērkāt šķidrumā.	Izņemiet visas samitrinātas slēdža pogas, jo tās nedarbosies pareizi.
32	Ja „Salvafix“ sistēma jālieto pacientiem mazgājot dušā, jālieto speciālie slēdži.	Pieprasiet papildus speciālu slēdžu lietošanas instrukcijas.
33	Kārbas ar šķērēm sarkanā krāsā, kas paredzētas ekstremālajām situācijām, novietojiet stratēģiski labā vietā.	Novietojiet tās netālu no pacienta, ka varētu pielietot, ja ir nepieciešams.
34	Magnētiskās slimnieku kopēju atslēgas stingri jākontrolē.	Ka magnētisko atslēgtu nepazaudētu, lietojiet speciālus atslēgu aizsargredzenus.
35	Pārliecinieties, ka pacients ar ceļiem nevarētu piekļūt pie galvas un to ievainot.	Lietojiet „Salvafix“ augšstilbu jostas un nostipriniet tās tuvāk ceļiem.
36	Regulārai „Salvafix“ sistēmas pārbaudei sastādiet pārbaužu plānu.	Rekomendējams sastādīt pusgada „Salvafix“ pārbaudes plānu.
37	Sastādiet „Salvafix“ apmācību grafiku, ka jūsu personāls ievērotu drošības ieteikumus.	Pēc sākuma „Salvafix“ personāla apmācības, rekomendējams sastādīt uz pusgadu pārbaužu plāna lietošanas metodes.
38	Apmāciet visus jaunus slimnieku kopējus.	Apmāciet strādāt ar nostiprināšanas sistēmām, institūcijas protokolu, drošības ieteikumiem u.c.
39	Lietojiet pārbaudes sarakstus.	Lietojiet „Salvafix“ pārbaudes sarakstus, lai pārlicinātos, ka nostiprināšanas sistēma darbojas pareizi.
41	Slimnīcas jānodrošina ar nestuvēm ar „Salvafix“ nostiprināšanas sistēmu, kad pacientu varētu ātri nostiprināt.	„Salvafix“ sistēma jāsamontē un jāgatavo lietošanai, ka pacientu varētu ātri piestiprināt.
42	Līpošas siksnu daļas jāaizsargā katru reizi mazgāšanas/žāvēšanas laikā.	Līpošas siksnu daļas tiks aizsargātas no novelšanās.

Salvafix® produktu apkopes ieteikumi


Regulāri attīriet siksnu lipekļus ar cietu suku un pārbaudiet, ka tie labi saķētos
Produkti ar lipekļiem jāsaāķē pirms mazgāšanas /žāvēšanas, ka lipekļi nesaveltos
Izņemiet visas pogas no fiksācijas izstrādājumiem pirms mazgāšanas /žāvēšanas
Pogas nedrīkst samitrināt vai iemērkāt šķidrumā. Nelietojiet pogas, kuras bija saslapušas vai iemērkatas šķidrumā, jo tās nedarbosies pareizi.
Mazgājiet/žāvējiet fiksācijas sistēmas mazgāšanas maisīnā. Tā nodrošināsiet ilglaicīgu produkta lietošanu.
Vadieties pēc Drošības ieteikumu plāna un regulāri pārbaudiet Salvafix fiksācijas sistēmas.

Magnētisko pogu uzlikšana

1. Magnētiskās pogas uzgaļa uzlikšana uz spraudes;
2. Uzgali jāspiež līdz atbalstās spraudē;
3. Viegli paraujiet pogas uzgali augšā un pagrieziet dažas reizes, lai pārliecinātos, ka poga ir pareizi uzlikta.

Magnētisko pogu noņemšana

1. Uzlieciet magnētisko atslēgu uz magnētiskās pogas uzgaļa;
2. Uzgali nospiediet līdz atbalstās spraudē;
3. Pogas uzgali un atslēgu noņemiet kopā.

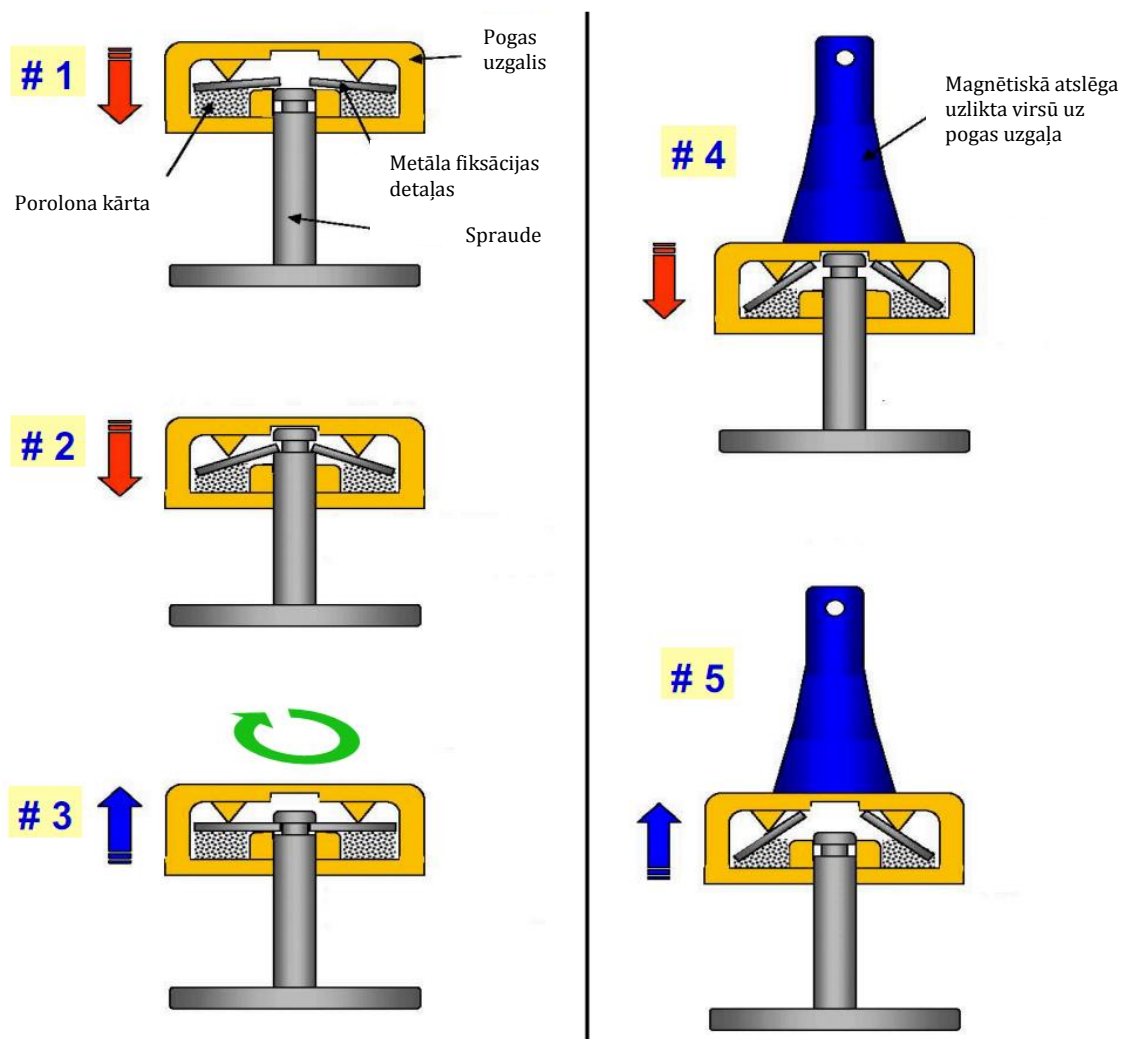

Drošības ieteikumi

Pārbaudes lapa

1. Salvafix PLASTIKA poga

1.1 Vai tā izskatās poga?



JĀ

Ja atzīmējāt


Lietojiet

NĒ

Ja atzīmējāt

Nelietojiet un izņemiet no apgrozības!

1.2 Vai poga cauruma iekšā /ārpusē redzas tumši putekļi ?

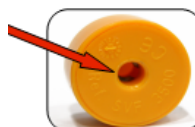

JĀ

Ja atzīmējāt

Lietojiet

NĒ

Ja atzīmējāt

Nelietojiet un izņemiet no apgrozības!

Uzmanīgi pārbaudiet

2. Salvafix nerūsosa tērauda KĀTS

2.1 Vai tā izskatās kāts?



JĀ

Ja atzīmējāt


Lietojiet

NĒ

Ja atzīmējāt

Nelietojiet un izņemiet no apgrozības!

2.2 Ar matosi erozijos žymēs kotelio tvirtinimo zonoje?

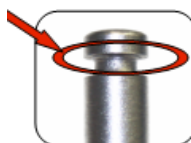

JĀ

Ja atzīmējāt

Lietojiet

NĒ

Ja atzīmējāt

Nelietojiet un izņemiet no apgrozības!

3. Salvafix TEKSTILIJAS ražojumi un daļas

Uzmanīgi pārbaudiet, vai nav materiāla/viņu bojājumu siksnās un jostās, to daļās:

Atzīmējiet ja JĀ

3.1 Bojājumi/ieplisumi metāla cilpās


3.2 Nolietošanās pazīmes

3.3 Izkritušas poga stiprināšanas atveres

3.4 Izdilušas vietas

3.5 Lipekļi novēlušies un nelīp

3.6 Izirušas vīles (pārbaudiet visu sistēmu)

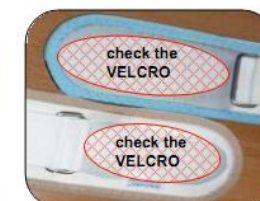

Ja atzīmējāt vienu vai vairāk punktu:

Ja atzīmējāt

Nelietojiet un izņemiet no apgrozības!