



GAMINIO INSTRUKCIJA

Prevenciniai čiūžiniai Optimal 5zon

Kodas: 561-085200/ 561-08200/561-090200

Gamintojas:



UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

Prevenciniai AD čiūžiniai

Tokiems gaminiams:

Optimal 5zon®

Optimal 5zon® BM

Optimal Cool

Optimal Care

Optimal Solett

Optimal Solett BM

Optimal Sumo AD

Prima 12



Prekės Nr. vartotojo instrukcija: 95-001101

CE



Turinys

Svarbios saugos priemonės	3
Įvadas	4
Gaminio aprašymas ir jo eksploatacinės savybės	7
Čiužinio išpakavimas	10
Priežiūros instrukcijos	10
Kita	11
Priedai	13

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas

Įspėjimas!

1. Gaminys turi būti naudojamas tik pagal šioje instrukcijoje nurodytą paskirtį. Gaminio negali derinti, surinkti ar taisyti su kitomis nei šioje instrukcijoje ar kitoje Care of Sweden dokumentacijoje nurodytomis dalimis, priedais ar atsarginėmis dalimis.
2. Čiužiniai yra apsaugoti higieniniu užvalkalu, stenkitės nenaudoti čiužiniams kitų užvalkalų.
3. **NENAUDOKITE** arti ugnies šaltinių/karštų paviršių, tokių kaip ugnies, degančių cigarečių ar karštų lempų. Nors gaminys yra išbandytas dėl gaisro, jį galima pažeisti, jei liesis su ugnies šaltiniais.
4. Padėkite ir naudokite gaminį taip, kad jis nebūtų prispaustas ar pažeistas. **DĖMESIO:** ypatingai saugokite, kad jis nebūtų pažeistas dėl suspaudimo naudojant lovos turėklus.
5. Visada įsitikinkite, kad čiužinys yra tinkamo dydžio.
6. Higieninis užvalkalas neleidžia prasiskverbti skysčiui ar orui, tačiau jis laidus garams. Užtikrinkite, kad pacientas yra tinkamoje padėtyje, kad išvengtumėte uždusimo rizikos.
7. Saugokite, kad čiužinio nepažeistų aštrūs daiktai.

1. Įvadas

Prieš naudodami visada perskaitykite vartotojo instrukciją.

1.1. Bendra informacija

Šis gaminys yra medicininis gaminys, turintis CE ženklimą pagal MDD 93/42/EEC. Jis taip pat atitinka taikomus standartus pagal medicinos direktyvas: SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS 876 00 11, SS-EN-ISO 12182, SS-EN-ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, EN 14126, EN 597-1, EN 579-2.

1.2. Paskirtis

Optimal AD čiužiniai yra prevenciniai, higieniniai čiužiniai, kurie yra naudojami visų rūšių priežiūros vietose skausmo palengvinimui, pragulų prevencijai ir kaip pagalbinė priemonė gydant pragulas.

Optimal 5zon[®], Solett, Sumo AD, Cura ir Cool čiužiniai yra kombinuoti čiužiniai, kurie dedami tiesiogiai ant lovos pagrindo. Optimal 5zon[®] BM ir Solett BM yra antčiužiniai, kurie dedami ant jau esamų čiužinių.

Čiužiniai su Evac užvalkalu turi rankenas ir Velcro diržus avarinei evakuacijai. Jei užvalkalas turi šonines rankenas, jos skirtos kelti tuščią čiužinį. Kitaip naudodami čiužinį jūs patys prisiimate riziką ir tuomet netaikoma gaminio garantija.

1.3 Evakuacijos instrukcijos


Evac yra čiužinio užvalkalas, kuris turi integruotą funkciją prie lovos prikaustytų pacientų evakuacijai. Gaisro ar kitos ekstremalios situacijos atveju nėra laiko galvoti, ką daryti toliau. Todėl labai svarbu, kad saugos įranga, taip pat evakuacijos procedūros būtų iš anksto gerai suplanuotos ir žinomos.

Evac užvalkalas turi tris rankenas galvūgalyje ir kojūgalyje. Iš šonų yra rankenos su Velcro diržais. Šie diržai skirti pritvirtinti pacientą prie čiužinio prieš pradedant evakuaciją. Diržai yra sulankstyti apsauginėse kišenėse čiužinio šonuose su išlindusiais galais, kad juos būtų galima lengvai ištraukti.

ĮSPĖJIMAS!


Asmenys, kurie atliks evakuaciją, privalo būti tinkamai apmokyti. Visada prieš pradėdami patikrinkite įrangą, užvalkalą ir čiužinį, kad užtikrintumėte saugią evakuaciją.

Evakuacijos instrukcijos

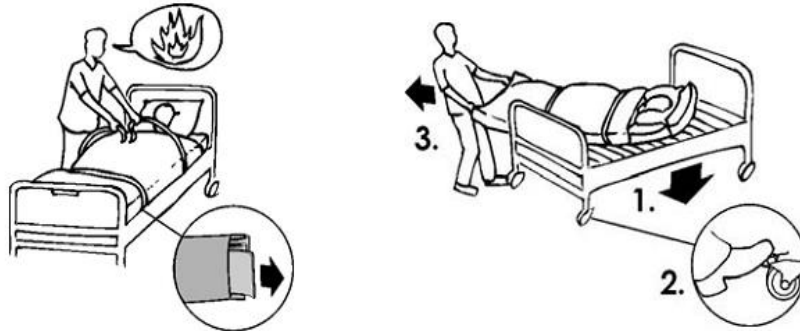

Nutraukimas nuo lovos

- Informuokite pacientą apie tai, kas vyksta.
- Nuleiskite lovą ir užfiksukite.
- Ištraukite ir pritvirtinkite velcro diržus taip, kad čiužinys sudarytų vamzdžio formą aplink pacientą.
- Naudodami išorines rankenas čiužinio kojūgalyje nutraukite čiužinį nuo lovos.
- Lėtai padėkite pacientą ant žemės.

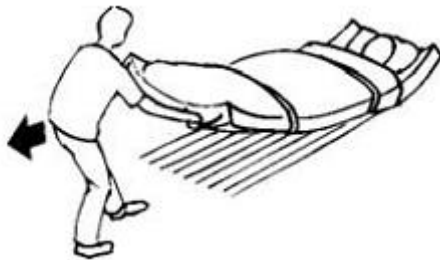


Ant lygaus paviršiaus

- Ištraukite išorines rankenas, esančias čiužinio kojūgalyje.
- Darbinė padėtis turėtų būti truputį pasvirusi atgal.

Traukimas žemyn laiptais

- Eikite atbulomis kol pagrindinė čiužinio dalis nenusileis nuo viršutinio laiptelio.
- Atsukite pacientui nugarą ir žiūrėkite judėjimo kryptimi.
- Viena ranka laikykitės už laiptų turėklų ir kita ranka traukite už vidurinės čiužinio rankenos.
- Leiskitės laiptais. Svarbu išlaikyti greitį nebėgant.

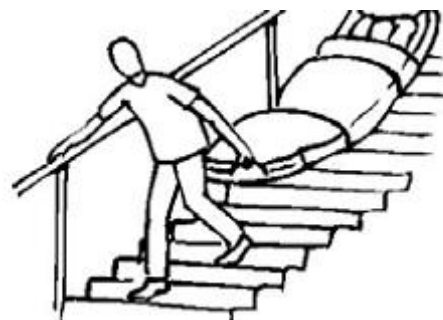

Mokymai/praktika

Apie ką reikia pagalvoti mokymų metu.

Nutraukimas nuo lovos:

- Lovoje gulintis pacientas neturėtų būti pačiame čiužinio viršuje, nes traukiant yra rizika užgauti jo galvą į lovą.

Traukimas žemyn laiptais:

- Pradėkite nuo tuščio čiužinio traukimo žemyn laiptais, kad įvaldytumėte techniką.
- Kai mokotės su pacientu, gulinčiu ant čiužinio, galvūgalyje rankenas galima sutvirtinti virve. Kitas asmuo gali sekti iš paskos ir padėti, jei iškiltų problemos.
- Rekomenduojama treniruotis ant tų pačių laiptų, kuriais bus vykdoma evakuacija.

Bendrai:

Pagrindinis mokymų tikslas yra ne pasiekti didelį greitį, bet išmokyti teisingos technikos.

Mokomieji užvalkalai

- Dėl didelio įrangos įtempimo evakuacijos metu, visada mokymų pabaigoje patikrinkite siūles ir rankenas. Mes rekomenduojame mokymams naudojamą įrangą paženklinti užrašu „mokymo įranga“ ir naudoti ją tik tam tikslui.

Paiškinimai

- Jei nenaudojami velcro diržai, iškyla rizika, kad pacientas nuslys/nuriedės nuo čiužinio.
- Traukimas iš galo sumažina įtampą traukiančiajam, tai reiškia, kad evakuacija gali būti greitesnė ir saugesnė.
- Traukimas laiptais yra pati sunkiausia evakuacijos dalis ir čia reikėtų treniruotis ypatingai kruopščiai.
- Paciento rankos turi būti po velcro diržais. Taip sumažinama rizika, kad išsigandęs pacientas už ko nors sugriebs.

DĖMESIO!

Čiužinio maksimalus vartotojo svoris taip pat yra ir svorio riba naudojant čiužinį evakuacijai.

Siekiant užtikrinti tinkamą evakuacijos užvalkalo funkciją, svarbu reguliariai tikrinti čiužinio kokybę.

Tikrinkite aptaisus ir kitus pažeidimus, kurie galėtų sukelti problemas evakuacijos metu.

2. Gaminio aprašymas ir jo eksploatacinės savybės

Optimal čiužiniai yra kelių dydžių: 80 cm, 85 cm, 90 cm pločio ir 200 cm, 205 cm ir 210 cm ilgio. Be to, yra 105x200 cm ir 120x200 cm dydžio čiužiniai. Jei reikia kitų dydžių, kreipkitės į Care of Sweden.

Daugiau informacijos gausite susisiekę su Care of Sweden arba savo vietiniu prekybos atstovu.

2.1 Užvalkalų pristatymas

Visi užvalkalai yra taip vadinami higieniniai užvalkalai. Juos lengva tvarkyti ir naudoti užtikrinant aukščiausius valymo ir higienos standartus. Užvalkalai yra laidūs garams, kas sumažina odos sušlapimo riziką.

Užvalkalas Olivia – užvalkalas su apsaugotu užtrauktuku iš trijų pusių. Kelių skirtingų aukščių. Spalva pilka ar mėlyna.

Evac užvalkalas – užvalkalas su apsaugotu užtrauktuku iš visų pusių, dalomas (viršutinė ir apatinė dalis). Funkcionalios rankenos evakuacijai, perkėlimui ir transportavimui. Spalva pilka/juoda.

Užvalkalas Sumo – kaip ir Evac užvalkalas, tačiau be rankenų evakuacijai. Funkcionalios rankenos iš keturių pusių čiužinio transportavimui, spalva pilka/juoda.

Užvalkalas Nordic – užvalkalas su suvirintomis siūlėmis ir apsaugotu užtrauktuku iš trijų pusių. Rankenos iš vienos ilgosios pusės čiužinio transportavimui. Spalva mėlyna.

Užvalkalas Skandic – užvalkalas su suvirintomis siūlėmis, užtrauktukas vienoje pusėje. Spalva mėlyna.

Užvalkalas Quilt – dygsniuotas užvalkalas su užtrauktuku iš trijų pusių.

2.2 Gaminio aprašymas

Optimal 5zon®

Pakaitinis čiužinys, kuris užtikrina puikų spaudimo išlyginimą ir turi unikalią sėdėjimo funkciją.

Funkcija: pragulų iki 2 kategorijos imtinai prevencijai ir gydymui.

Pagrindas: aukšto elastingumo porolonas 65+50 kg/m³.

Aukštis: 14 cm.

Užvalkalas: Evac, Olivia, Nordic ir Quilt.

Vartotojo svoris: 0-150 kg.

Garantija: 3 metai.



Integruota sėdėjimo funkcija

Optimal 5zon® BM

Minkštas ir lankstus antčiužinis, kuris dedamas ant esamo čiužinio viršaus. Unikalus čiužinio dizainas užtikrina geras spaudimo išlyginimo savybes.

Funkcija: pragulų iki 1 kategorijos imtinai prevencijai ir gydymui.

Pagrindas: aukšto elastingumo porolonas 65 kg/m³.

Aukštis: 6 cm.

Užvalkalas: Olivia ir Quilt.

Vartotojo svoris: 40-130 kg.

Garantija: 2 metai.

Optimal Cool

Čiužinio pakaitinė sistema su profiliuotu paviršiumi.

Funkcija: pragulų iki 1 kategorijos imtinai prevencijai ir gydymui.

Pagrindas: aukšto elastingumo porolonas 35 kg/m³.

Aukštis: 13 cm.

Užvalkalas: Olivia, Evac, Nordic ir Quilt.

Vartotojo svoris: maks. 110 kg.

Garantija: 2 metai.

Optimal Cura

Dviejų sluoksnių čiužinio pakaitinė sistema, aukšto elastingumo porolonas ir viskoelastinis porolonas.

Funkcija: pragulų iki 1 kategorijos imtinai prevencijai ir gydymui.

Pagrindas: aukšto elastingumo porolonas + viskoelastinis porolonas 50 kg/m³.

Aukštis: 13 cm.

Užvalkalas: Olivia, Evac, Nordic ir Quilt.

Vartotojo svoris: maks. 130 kg.

Garantija: 3 metai.

Optimal Solett

Čiužinio pakaitinė sistema, sukurta specialiai lengviems ir jautriems asmenims.

Funkcija: pragulų iki 1 kategorijos imtinai prevencijai ir gydymui.

Pagrindas: aukšto elastingumo porolonas 50 kg/m³ + 35 kg/m³.

Aukštis: 12 cm.

Užvalkalas: Olivia, Evac, Nordic ir Quilt.

Vartotojo svoris: maks. 60 kg.

Garantija: 2 metai.

Optimal Solett BM

Minkštas antčiužinis, sukurtas specialiai lengviems ir jautriems asmenims.

Funkcija: pragulų iki 1 kategorijos imtinai prevencijai ir gydymui.

Pagrindas: aukšto elastingumo porolonas $50 \text{ kg/m}^3 + 35 \text{ kg/m}^3$.

Aukštis: 6 cm.

Užvalkalas: Olivia ir Quilt.

Vartotojo svoris: maks. 60 kg.

Garantija: 2 metai.

Optimal Sumo AD

Pakaitinė čiužinio sistema, sukurta specialiai labai sunkiems asmenims ir turinti unikalią sėdėjimo funkciją.

Funkcija: pragulų iki 1 kategorijos imtinai prevencijai ir gydymui.

Pagrindas: aukšto elastingumo porolonas $65 \text{ kg/m}^3 + 50 \text{ kg/m}^3$.

Aukštis: 15 cm.

Užvalkalas: Sumo ir Nordic .

Vartotojo svoris: 100-270 kg.

Garantija: 1 metai.



Integruota sėdėjimo funkcija

PRIMA 12

PRIMA 12 abipusis čiužinys. PRIMA yra paprastas ir funkcionalus standartinis čiužinys, patogus ir ilgaamžis.

Pagrindas: HR porolonas 35 kg/m^3 (High Resilience)

Aukštis: 13 cm

Užvalkalas: Marin, Tricot, Marin/Evac ir Quilt

Vartotojo svoris: 0-130 kg

Garantija: 3 metai

Numatomas tarnavimo laikas 5 metai.

3. Čiužinio išpakavimas

Visi čiužiniai pristatomi suspausti ir supakuoti į perduriamą plastiką. Jie yra suspausti tam, kad mūsų klientams būtų lengviau juos tvarkyti ir kad būtų sumažintas transportavimo tūris; mes sumažiname poveikį aplinkai.

1. Pradėkite nuo patikrinimo, ar nepažeista pakuotė. Nuimkite plastikinį maišą ir bet kokią apsauginę medžiagą. Atidarydami pakuotę stenkitės nenaudoti peilio, kadangi galite pažeisti higieninį užvalkalą.
2. Pataisykite užvalkalą. Čiužiniai, kurie pristatomi su dalijamu Evac užvalkalu, yra supakuoti su viršutine dalimi sulankstyta čiužinio viduje. Išlankstykite viršutinę dalį ir užtraukite užtrauktuką.
3. Prieš naudojimą čiužinys turi maždaug 2 valandas pagulėti neišpakuotas ant plokščio paviršiaus. Tačiau, jei reikia, čiužinį galima naudoti nedelsiant. Gali užtrukti iki savaitės kol čiužinys atgaus savo pilną plotį/aukštį, buvusį iki suspaudimo.

4. Priežiūros instrukcijos

Prieš naudojant gaminį kitam vartotojui svarbu laikytis žemiau pateiktų nurodymų. Jei dvejojate, pasikonsultuokite su asmeniu, atsakingu už higieną, ar tiekėju, kurie padės ir duos nurodymus.

SVARBU!

Tikrinkite higieninį užvalkalą kiekvieną kartą, kai jį valote. Jei užvalkalas pažeistas, jį reikia pakeisti arba sutaisyti. Jei gaminys turi Evac užvalkalą, taip pat reikia reguliariai tikrinti rankenas ir diržus. Kruopščiai laikykitės vietinių instrukcijų ir valymo specialistų instrukcijų.

4.1 Higieninis užvalkalas



Užvalkalus galima nuvalyti švelnia valymo priemone (pvz. plovimo skysčiu) ir vandeniu ar tam tikslui skirta dezinfekcine priemone alkoholio pagrindu/valikliu. Taip pat galima naudoti Perform, Virkon ar Desisoft. Ekskrementų ir kraujo dėmes būtina nedelsiant pašalinti šaltu vandeniu. Atidžiai laikykitės vietinių instrukcijų ir valiklio vartojimo instrukcijų.



Kelių sluoksnių užvalkalus prieš skalbimą reikia išskirti. Skalbkite su panašių spalvų skalbiniais.



Valikliai chloro ar fenolio pagrindu gali daryti neigiamą įtaką PU paviršiui ir jų reikėtų vengti. Jei naudojamas chloras, rekomenduojamas maks. 1% mišinys.

4.2 Čiužinio pagrindas

Higieninis užvalkalas visiškai apsaugo poroloninį pagrindą, tai reiškia, kad valyti pagrindą retai kada reikia. Jei dėl kokių nors priežasčių pagrindą reikia valyti, valykite suteptą vietą švelnia valymo priemone ir vandeniu (pavyzdžiui, papurkšdami). Kruopščiai išspauskite vandenį.

Leiskite čiužiniui išdžiūti šiltoje, vėdinamoje vietoje, neveikiant tiesioginiams saulės spinduliams. Pagrindas turi būti visiškai išdžiuvęs prieš jį vėl naudojant. Kai reikia, naudokite alkoholio pagrindo dezinfekavimo priemonę/valiklį. Galima naudoti Perform, Virkon ar Desisoft.

Kita

5.1 Laikymas

Laikykite čiužinį ant plokščio paviršiaus arba kruopščiai suvyniotą/sulankstytą ir užtrauktą užtrauktuku. Visuomet laikykite gaminius kambario temperatūroje sausoje vietoje. Užtikrinkite, kad gaminys laikomas tokioje vietoje, kur jis nebus pradurtas, daužomas ar šalia kitų daiktų, kurie gali jį pažeisti. Venkite tiesioginių saulės spindulių poveikio. Jei čiužinį reikia laikyti ilgiau nei 3 mėnesius, rekomenduojame laikyti jį ant plokščio paviršiaus (nesuvyniotą ar nesulankstytą).

5.2 Ženklinimas

Gaminys turi etiketę, kurioje nurodyta pagaminimo data, gaminio numeris, dydis, priežiūros ir skalbimo nurodymai, EAN brūkšninis kodas, taip pat palikta vieta savam ženklinimui.

5.3 Garantija

Smulkesnės informacijos apie kiekvienam čiužiniui suteikiamą garantiją ieškokite 2.2 skyriuje. Garantija galioja gamybos klaidoms. Garantija negalioja įprastam gaminio nusidėvėjimui ar būklės pablogėjimui, ar pažeidimams, kurie atsirado dėl nerūpestingo elgesio su gaminiu ar netinkamos jo priežiūros.

5.4 Aptarnavimas ir priežiūra

Gaminiui nereikalingas joks kitas aptarnavimas ar priežiūra išskyrus valymą, kaip aprašyta vartotojo instrukcijoje.

5.5 Taisymai

Kreipkitės į tiekėją dėl instrukcijų.










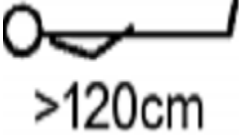
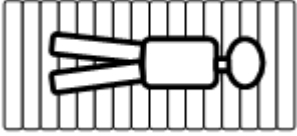



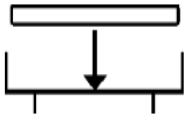
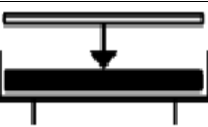
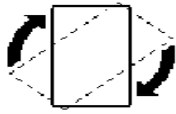

5.6 Perdirbimas














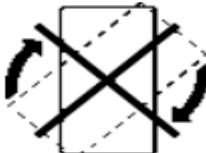


Gaminiai yra visiškai perdirbami ir turėtų būti perdirbami kaip „degios atliekos“. Išardymas nereikalingas.

5.7 Gražinimas ir skundai

Skundai turi būti pateikiami tiekėjui. Gražinama laikantis tiekėjo nurodymų ir tai galima padaryti po to, kai pateikiamas skundas. Apie transportavimo metu padarytus pažeidimus turi būti pranešama transportavimo atstovui.

5.8. Simbolių apibrėžimai

XXXX-XX-XX			
Metai-mėnuo-diena	Skaityti vartotojo instrukciją	Įžemintas kontaktas	Turintis CE ženklimą pagal MDD93/42/EEC
			CATEGORY 1 2 3 4 
II klasės įrengimas (dvigubo izoliavimo)	BF tipo įrengimas	Klasifikavimas pagal degumą	Paciento informacija – kategorija
			
Kojų vieta	Rekomenduojamas paciento svoris	Rekomenduojamas minimalus ilgis	Čiužinys turėtų būti naudojamas tik gulint ant jo išilgai
			
Negalima dėti į buitines atliekas, laikytis perdirbimo instrukcijų	Perdirbimas	Garantijos trukmė	
			
Tiesiai ant lovos pagrindo	Dėti ant esamo čiužinio	Galima apsukti	Galima apversti

			 Do not turn
Netiesiogiai ant lovos pagrindo	Nedėti ant esamo čiužinio viršaus	Neapsukti	Neapversti
			
Dėti ant viršaus	Dėti po apačia	Nuvalyti	Nelyginti
			
Skalbti skalbyklėje 70°C temperatūroje	Skalbti skalbyklėje 95°C temperatūroje	Džiovinti džiovyklėje	Pakabinti džiūti negręžiant
			
Nedžiovinti džiovyklėje	Cheminis valymas dražiamas	Chloras	Nenaudoti chloro

6. Priedai

Šiems čiužiniams yra skirta eilė priedų. Jie nurodyti žemiau pateikiamame sąrašė.

Evac užvalkalas, viršutinė dalis (Optimal 5zon®, Solett, Sumo AD, Cura, Cool)	431-xxxxxx*
Evac užvalkalas, apatinė dalis 12 cm (Optimal 5zon®, Solett, Cura, Cool)	461-xxxxxx*
Evac užvalkalas, apatinė dalis 14 cm (Optimal 5zon®)	471-xxxxxx*
Evac užvalkalas, apatinė dalis 15 cm (Optimal Sumo AD)	481-xxxxxx*
Pilnas Evac užvalkalas (Optimal 5zon®)	418-xxxxxx*
Pilnas Evac užvalkalas (Optimal Solett, Cura, Cool)	419-xxxxxx*
Pilnas Sumo užvalkalas (Optimal Sumo AD)	420-xxxxxx*
Užvalkalas Olivia, 14 cm (Optimal 5zon®)	25-xxxxxx*
Užvalkalas Olivia, 6 cm (Optimal 5zon® BM, Solett BM)	29-xxxxxx*
Užvalkalas Olivia, 13 cm (Optimal Solett, Cura, Cool)	292-xxxxxx*
Užvalkalas Nordic (Optimal 5zon®, Solett, Cura, Cool)	287-xxxxxx*
Maišas antčiužiniui (80-90 cm plotis)	58-900904
Maišas pakeitimo čiužiniui, 80-90 cm pločio, poliesteris.	58-900902

Otimal Lufta	
80 cm pločio	401-080200
90 cm pločio	401-090200

*-xxxxxx gaminio numeriuose žymi gaminio dydį. Pavyzdžiui, 29-090200 žymi 90x200 cm Olivia užvalkalą.

6.1 Kiti priedai

Optimal prailginimo dalis

Prailginimo dalis yra priedas, kuris naudojamas užpildyti erdvę, kurią palieka trumpas čiužinys ilgoje lovoje. Prailginimo dalis gali būti įvairių dydžių priklausomai nuo čiužinio pločio ir aukščio.

Optimal higieninė pagalvė

Higieninė pagalvė yra sukurta priežiūrai, ji yra patogi ir labai lengvai valoma. Pristatoma kartu su nuimamu higieniniu užvalkalu. Pagalvė yra tokių dydžių: 35x45, 50x60 ir 50x70 cm.

Optimal Sens

Anatominės formos pagalvė, suteikianti maksimalią atramą kaklui. Pagaminta iš viskoelastinio porolono ir pristatoma su nuimamu higieniniu užvalkalu.

Curera® atrama

Priemonė padėties palaikymui ir padėties keitimui. Atramą lengva naudoti ir ji turi nuimamą, skysčiams atsparų higieninį užvalkalą.

Molly kulnų apsauga

Molly skirta suteikti patogią atramą kulnams. Vartotojas gali judinti koją ir keisti padėtis. Ji turi nuimamą skysčiams atsparų higieninį užvalkalą. Molly yra trijų dydžių: mažo, vidutinio ir didelio.

Curera® padėties reguliavimo pagalvės

Curera® yra pagalvės, kurios naudojamos padėties reguliavimui, spaudimo sumažinimui ir atramai visų rūšių priežiūros įstaigose. Kai prie lovos prikaustyti asmenys pakankamai nejuda, tai padidina pragulų susidarymo riziką. Reguliariai keičiant padėtį tokia rizika sumažinama ir pakeliamas komforto lygis.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie mūsų gaminius kreipkitės į Care of Sweden ar savo vietinį prekybos agentą.

Pagaminta
Care of Sweden

Kontaktai:

Tel.: +46 771 106600

Faks.: +46 325 12840

El. paštas: info@careofsweden.se

Internetas: www.careofsweden.com

Adresas:

Care of Sweden AB
Box 158
SE-512 24 Svenljunga
Švedija

Apsilankymų/krovinių adresas:

Boråsvägen 14
SE-512 53 Svenljunga
Švedija

Tiekėjas**UAB "Slaugivita"**

Dubijos g. 16, 77172 Šiauliai, Lietuva
Tel. +370 41 522439
Fax. +370 41 595279
E-mail: info@slaugivita.com
www.slaugivita.com

© Care of Sweden AB, 2011

Care of Sweden, Optimal 5zon, CuroCell ir Curera yra Care of Sweden AB prekiniai ženklai.

**Pardavėjas: UAB "Slaugivita"
GARANTINIS TALONAS**

Įrengimo pavadinimas:

Modelis:

Serijos Nr.:

Pardavimo data: _____ PVM Sąskaitos-faktūros SLS Nr.:

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 24 garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju: Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: Jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204

info@slaugivita.com

www.slaugivita.com

1. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)