



SLAUGIVITA
Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

Perkėlimo paklodė ReadySlide

112_ _

Gamintojas: Handicare



handicare



Autorių teisės šiame dokumente, įskaitant bei apibojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „išvaizdos“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštiško „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bet kokio švesinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo traukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spausdinti ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti neišamamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB “Slaugivita”

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

ReadySlide

Skirta naudoti: perkėlimams iš (i) lovos į (iš) vežimėlį, vartymui lovoje, pakėlimui lovoje aukšty. Paklodė sumažina trintį po paciento kūnu. Su rankenėlėmis išilgai paklodės.

Užspauskite vežimėlio ratų stabdžius prieš atliekant perkėlimą. Negalima palikti slidžiosios paklodės po pacientu.

Būkite atsargūs sėdint ant paklodės ant lovos krašto!

Funkcionalumo patikrinimas: funkcionalumą reikia patikrinti prieš naudojimą ir vėliau daryti tai reguliariai, ypač po skalbimo. Patikrinkite, kad siūlės ir rankenos būtų nepažeistos. Patraukite už kiekvienos rankenos ir pažiūrėkite, ar jos atlaiko didelį apkrovimą. Jeigu pastebėsite susidėvėjimo požymių, priemonės nebenaudokite.

Trumpa informacija

Prekės nr.	Gaminys	Dydis
11215	ReadySlide, su rankenomis	195x70 cm
11250	ReadySlide	70x70 cm

Sudėtis: poliamidas



Max: 150 kg



Gaminio priežiūra:

Perskaitykite gaminio etiketę. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Džiovinimas žemoje temperatūroje.



Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims.

Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)