



# SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

## GAMINIO INSTRUKCIJA

LiftSeat kėlimo sėdynė/diržas

400\_

*Gamintojas: Handicare*



# handicare



Autorių teisės šiame dokumente, įskaitant bet apibrėžtinį visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „šaltosios“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.  
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, bet išankstinio rašiško „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį (ar jo dalį) bet kokia forma, įskaitant kadrovimą, bet kokio švestinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įtraukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą trečiuosiemis asmenims.  
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.


UAB „Slaugivita“

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

[info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com), [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)

# LiftSeat

SystemRoMedic™

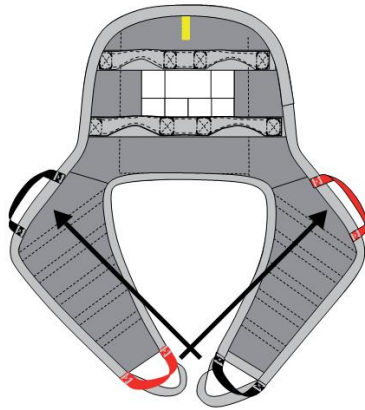

Max load: 150kg/330lbs

LiftSeat yra kėlimo diržas, skirtas pacientų perkėlimui sėdimoje padėtyje. Jį lengva naudoti, o pacientas jaučiasi saugiau, keliamas sėdimoje padėtyje. Kojų dalis su iškirpte, o tai reiškia, kad pacientas nesėdi ant diržo. Tuo pačiu, diržas tvirtai palaiko paciento nugarą ir kojas. LiftSeat skirtas daugumai situacijų, kur reikalingas rankinis paciento perkėlimas sėdimoje padėtyje, pavyzdžiui, iš vežimėlio į lėktuvo sėdynę.

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimą lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkcinių sugebėjimų bei poreikių.




### Vaizdinis patikrinimas

Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.

### Visada perskaitykite instrukcijas


Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.

### Aprašymas

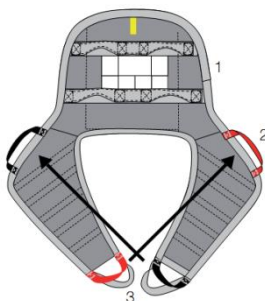

1. LiftSeat turi 4 horizontalias rankenas nugaros dalyje; pasirinkite rankenas, kad užtikrinti tinkamą darbinę padėtį.
2. Viena iš rankenų klubų srityje yra raudonos spalvos; keliant pacientą, šią rankeną reikia laikyti kartu su rankena, esančią priešingoje kojų dalies pusėje. Taip pat turi būti laikomos kitos rankenos, kurių spalva juoda. (žr. paveikslėlį)
3. Apatinėje diržo dalyje yra po dvi rankenas kiekvienoje pusėje. Keliant smulkesnį pacientą, pasirinkite trumpesnes rankenas (raudoną ir juodą); keliant stambesnį pacientą, pasirinkite ilgesnes (pilkas) rankenas.

### LiftSeat uždėjimas, kai pacientas sėdi vežimėlyje/kėdėje ar lovoje.

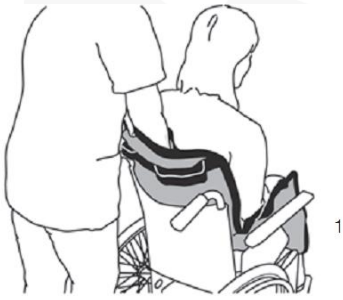

1. Laikykite LiftSeat viena ranka, o kita ranka paimkite apatinę diržo dalį. Bus lengviau, jei pacientas lengvai pasvirs į priekį savarankiškai ar su slaugytojo pagalba. Stumkite diržą žemyn už paciento nugaros iki pat kryžkaulio, jei yra galimybė.

Pakiškite diržą po paciento klubais, stumdami jį iš abiejų vežimėlio šonų žemyn.




2. Pakiškite kojų diržus po paciento šlaunimis. Atsisėskite priešais pacientą, pakiškite kojų diržą po šlaunimis ir lengvai patemkite, kad diržas gerai apglėbtų paciento šlaunis, prilaikytų kelius ir neleistų pacientui nuslysti nuo kėdės/vežimėlio.



3. Patikrinkite, kad kojų diržai būtų vienodai išsikišę iš abiejų paciento pusių. Abu kojų diržai turi būti pakišti po paciento šlaunimis.

### Kėlimas ir perkėlimas

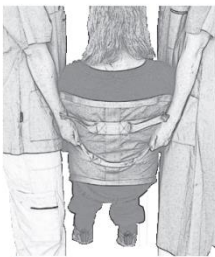


1. Pasirinkite rankenas: kojų diržai turi po dvi rankenas abiejose pusėse. Pasirinkite reikiamas rankenas, atsižvelgiant į paciento svorį/plotį.


2. Nugaros dalyje yra 2 lygių rankenos; pasirinkite tinkamas, kad užsitikrinti taisyklingą kūno padėtį.

Planuokite perkėlimą, kad minimizuoti kėlimo atstumus ir laiką.

### Skirtingos kėlimo padėtis

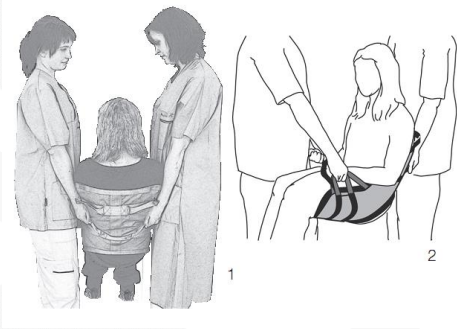

1. Po vieną slaugytoją kiekvienoje pusėje.
2. Vienas slaugytojas už nugaros, kitas iš priekio.

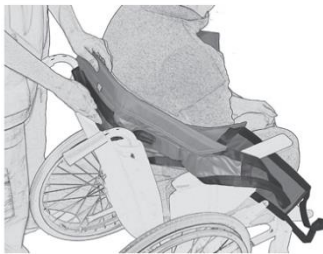


### Diržo išėmimas iš po sėdinčio paciento

Sulenkite kojų diržus, pakiškite po paciento šlaunimis ir patraukite iš abiejų paciento šonų.

Tada patraukite diržą į viršų už paciento nugaros.

### Papildomas nugaros palaikymas, naudojant EasyGlide lentutę

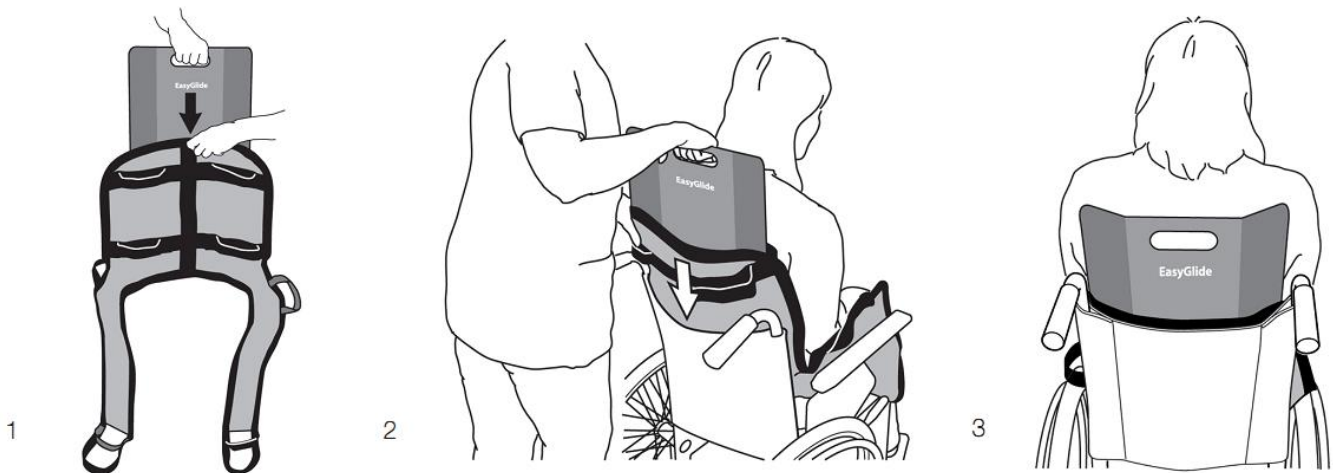

1. Įdėkite lentutę į LiftSeat kišenę nugaros dalyje.
2. Pakiškite LiftSeat su lentute už paciento nugaros.
3. Palikite EasyGlide už paciento nugaros perkėlimo metu.

**Sudėtis:** Poliesteris. Ilgaamžė mažos trinties medžiaga. Atlaiko aukštą skalbimo temperatūrą.

**Gaminio priežiūra**

Perskaitykite gaminio etiketę.

Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Džiovinimas žemoje temperatūroje.



Kodas	Dydis	Rekomenduojamas paciento svoris
4003	XXS/XS	15-45 kg
4006	S/M	35-90 kg
4007	L/XL	80-120

UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, Šiauliai, LT77172, tel. : +370 41 522439, faks.: +370 41 595279

e-mail: [info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com), [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com), nemokama linija 8 800 00225

**Pardavėjas: UAB "Slaugivita"**

**GARANTINIS TALONAS**

Įrengimo pavadinimas: \_\_\_\_\_

Modelis: \_\_\_\_\_

Serijos Nr.: \_\_\_\_\_

Pardavimo data: \_\_\_\_\_; PVM Sąskaitos-faktūros \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_

Pardavėjo pavardė \_\_\_\_\_ Parašas \_\_\_\_\_

**Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.**

**Garantija netaikoma:**

**Netinkamos priežiūros atveju :** Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

**Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju:** t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

**Modifikacijos atveju:** Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

**Kitais atvejais:** jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

**Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" nepriima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.**

**Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpį neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.**

**Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:**

Pirkėjo parašas \_\_\_\_\_

**Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204**

[info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com) [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)

**1. Gedimas** \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**2. Gedimas** \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)