



SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

Perkėlimo lentutė EasyGlide

50__

Gamintojas: *Handicare*



handicare



Autorių teisės Šiame dokumente, įskaitant bei apribojimą visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „Slaugivita“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštinio „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadravimą, bet kokio išvestinio kopavimo sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įrašymą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti veikiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB „Slaugivita“

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com



Manual - English

EasyGlide

SystemRoMedic™



EasyGlide perkėlimo lentutės naudojamos perkėlimams sėdimoje pozicijoje tarp vežimėlio ir lovos, tualetu ar į automobilį. EasyGlide yra kelių išmatavimų, todėl atitinka daugelio naudotojų poreikius. Mažus modelius dažniausiai naudoja aktyvūs pacientai, kurie gali persikelti savarankiškai.

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimų lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkcinių sugebėjimų bei poreikių.




Vaizdinis patikrinimas

Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.



Visada perskaitykite instrukcijas

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.

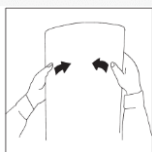



Funkcinis patikrinimas

Atsargiai pabandykite sulenkti perkėlimo lentą, kad patikrinti jos tvirtumą. Lenta turi būti elastinga ir tvirta tuo pačiu metu. Nebenaudokite perkėlimo lentos, kai jos tvirtumas yra sumažėjęs.




Maksimalus naudotojo svoris



EasyGlide 5020, 60x33 cm

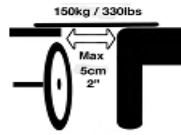
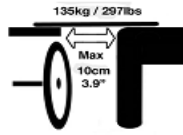


EasyGlide 5050, 75x33 cm

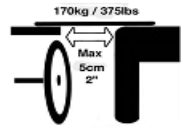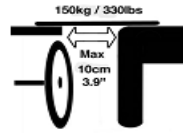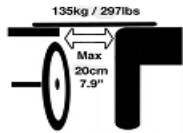

EasyGlide 5060, 60x25 cm

EasyGlide 5070, 45x20 cm

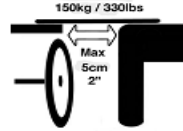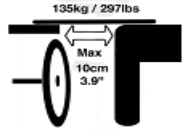

Naudojimas

Pastatykite vežimėlį kampu kuo arčiau lovos. Nuimkite porankį iš lovos pusės ir išimkite kojų atramas. Padėkite EasyGlide lentutę kaip tiltą tarp lovos ir vežimėlio. Jei tai lentutės modelis, kuris turi užlenkiamus kraštus, užlenktą kraštą dėkite iš vežimėlio rato pusės. Kad pakišti lentutę po pacientu, lengvai palenkite pacientą į priešingą nuo savęs pusę ir pakiškite lentutę.



Kai perkėlimas baigtas, EasyGlide išimama pakėlus ją į viršų ir traukiant į save (žr. paveikslėlių)



Aktyvūs pacientai su EasyGlide gali persikelti savarankiškai. Įsikibkite į porankį ir pasilenkite link vežimėlio. Svarbu prisiminti, kad reikia dar kartą pasvirti link lovos, kai perkėlimas baigtas, kad atsisėstumėte gilyn ir į vežimėlio vidurį.



Jei pacientui persikėlimo metu reikalinga pagalba, EasyGlide reikėtų naudoti kartu su diržu FlexiBelt/EasyBelt

Slaugytojas gali padėti pacientui stovėdamas iš priekio ar už nugaros.

Pastaba: kojų pakelėjas FootStool gali būti naudojamas kaip priedas, kad pakelti paciento kelius.



EasyGlide taip pat gali būti naudojamos perkėlimams į/iš automobilio.

Sudėtis: polietilenas

Gaminio priežiūra: Valykite su vandeniu ir dezinfekcijos priemone.

Kodai:

5020 EasyGlide 60x33 cm

5050 EasyGlide 75x33 cm

5060 EasyGlide 60x25 cm

5070 EasyGlide 45x20 cm



GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju: Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. **Gedimas** _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)