



SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

Perkėlimo ovali lentutė EasyGlide

5040

Gamintojas: Handicare



handicare



Autorių teisės Šiame dokumente, įskaitant bei apibojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „Slaugivita“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.
Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštinio „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadrovimą, bet kokio išvestinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir turiniu, jo įtraukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.
Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spausdinti ir kitus veidus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB „Slaugivita“

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

EasyGlide

SystemRoMedic™



Mani
M
Manui

REF
5040
5042

SWL: 300 kg/660 lbs



GULINČIO PERKĖLIMAS,
PASLINKIMAS



KĖLIMO DIRŽO UŽDĖJIMAS

Perkėlimo lentutė, skirta naudoti gulinių pacientų perkėlimams, pakelti pacientą lovoje link galvūgalio, taip pat kėlimo diržų uždėjimui palengvinti. Ypatingai tinka naudoti, kai yra tarpas tarp paviršių (iki 5 cm) ir nedidelis paviršių aukščio skirtumas.

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimą lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkcinių sugebėjimų bei poreikių.




Vaizdinis patikrinimas

Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.



Visada perskaitykite instrukcijas

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.

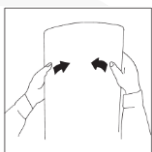


Funkcinis patikrinimas

Atsargiai pabandykite sulenkti perkėlimo lentą, kad patikrinti jos tvirtumą. Lenta turi būti elastinga ir tvirta tuo pačiu metu. Nebenaudokite perkėlimo lentos, kai jos tvirtumas yra sumažėjęs.


Maksimalus naudotojo svoris

Jūsų saugumui, abu paviršiai, tarp kurių vyksta perkėlimas turi būti tvirti. Didžiausias leidžiamas svoris, kai atstumas tarp perkėlimo paviršių yra 5 cm. Niekados nepalikite paciento vieno perkėlimo metu.

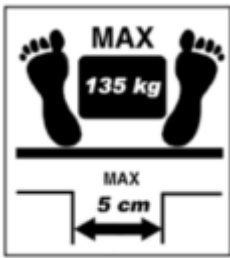

Naudojimas

Perkėlimas nuo lovos ant kitos lovos

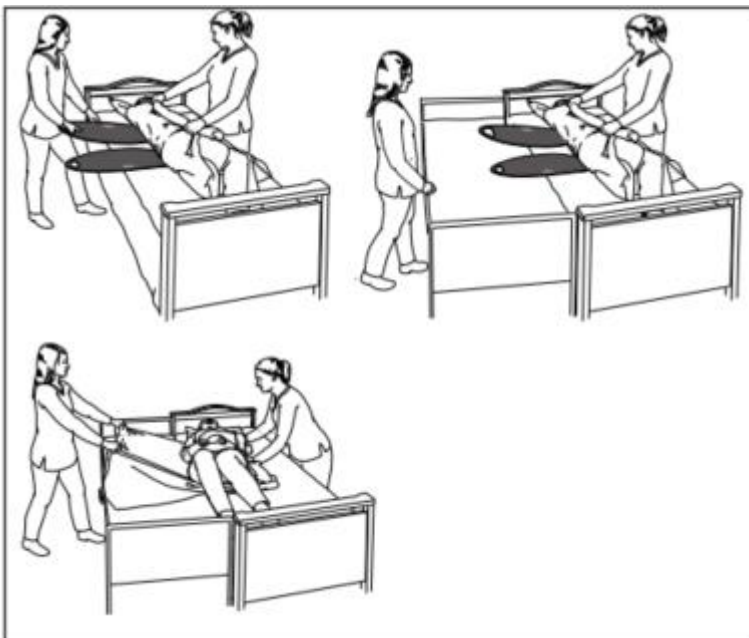

EasyGlide lentutės yra padedamas po naudotojo klubais ir pečiais. Naudotojas paverčiamas ant šono. Galima pasitelkti paklodę, palengvinti šią užduotį. Padėkite lentelę tarp paklodės ir perkėlimo/ vartymo paklodės. Prispauskite lentelę prie čiužinio.

Dėmesio, jei naudojate dvi lentutes, įsitinkite, kad oda nėra prispaudžiama.

Perkėlimas ant lentučių.

Padėkite lentutę tarp dviejų perkėlimo paviršių. Naudodami kartu perkėlimo paklodę galėsite geriau išnaudoti erdvę ir taip palengvinti perkėlimą.

Įsitinkinti, kad atstumas tarp perkėlimo paviršių nėra didesnei nei 5cm. Verskite naudotoją ant lentučių ir tempkite perkėlimo paklodę, kad perkeltumėte.

Lentutės nuėmimas

Lentutes nuimsite patraukę už rankenėlių. Palaikykite naudotoją, kad nejudėtų, kai traukiamos lentutės.

Perkėlimas lovoje

Padėkite lentutes išilgai iš abiejų šonų. Lentutės turėtų pasislinti po pečiais ir nugara. Lentutės turi būti padedamos po nugara taip, kad jos susitiktų. Slaugytojao stovėdamas iš šonų prie paciento paima lenteles už rankenėlių ir žengia į perkėlimo pusę.




Lentutės naudojimas uždėti kėlimo diržą sėdinčiam naudotojui



Už nugaros padėti abi lentutes. Lentutės turi būti tarp nugaros ir atlošo.

Tada uždėti kėlimo diržą, kad jis būtų tarp lentučių. Įstikinti, kad diržo vidurinė dalis yra ten, kur naudotojo nugara. Sugriebti diržą ir jį užtemti taip, kad jis atsidurtu vietoje. Kai diržas bus teisingoje pozicijoje, ištraukti lentutes. Toliau sutvarkykite diržo kojų dalį.

Lentutės naudojimas uždėti kėlimo diržą gulinčiam

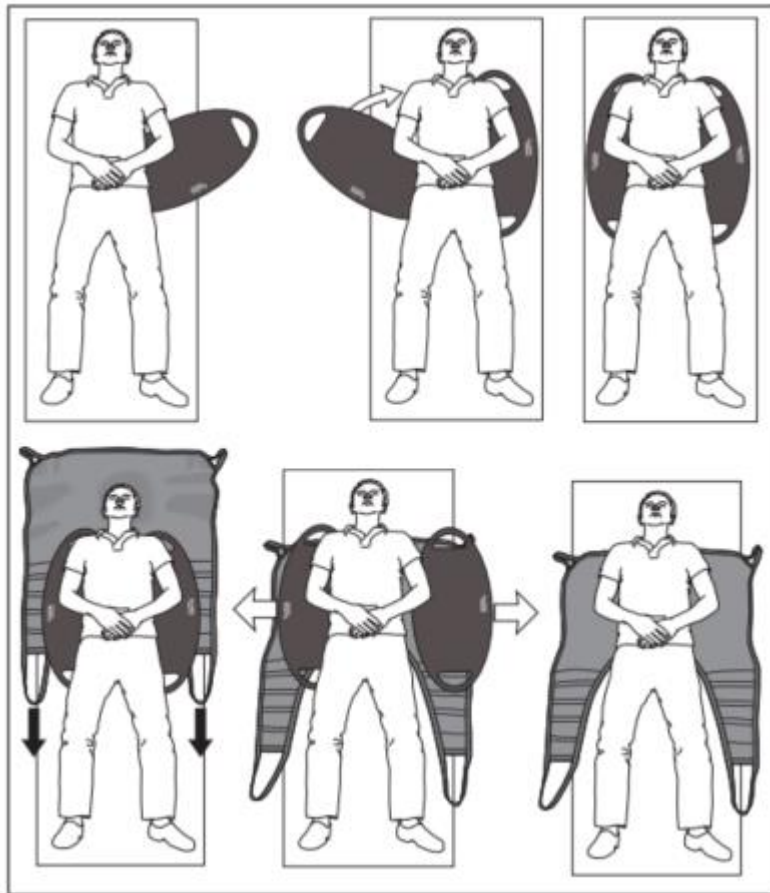

Sudėtis: polietilenas

Gaminio priežiūra: Valykite su vandeniu ir dezinfekcijos priemone.



I medicinos klasės gaminy

Gaminys atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.

Gaminio numatyta tarnavimo trukmė – 10 metų.



handicare

Gamintojas Handicare AB
Maskinvägen 17
SE-972 54 Luleå, SWEDEN
Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se
www.handicare.com

Padėti lentutes iš abiejų pusių po nugarą, kad apimtu pečius ir nugarą ir kryžkaulį. Lentutės turi susitikti per vidurį po naudotoju.

Uždėkite kėlimo diržą, taip, kad kojų dalis eitų žemyn.

Traukti kėlimo diržą žemyn taip, kad diržas būtų tarp lovos pavišiaus ir lentučių, tol, kol pasieksite dubenį.

Jei galite tai darykite dviese. Taip vienas traukia vieną pusę, o kitą antras slaugytojas.

Išimti lentutes.

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: _____

Modelis: _____

Serijos Nr.: _____

Pardavimo data: _____; PVM Sąskaitos-faktūros _____ Nr.: _____

Pardavėjo pavardė _____ Parašas _____

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

Garantija netaikoma:

Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

Kitais atvejais: jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.

Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas _____

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

1. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas _____

Data: _____

Panaudotos dalys: _____

Servisas _____

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)