



# SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

## GAMINIO INSTRUKCIJA

TurnTable diskas

508\_(2/3/4/5)



# handicare



Autorių teisės šiame dokumente, įskaitant bei apibojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafikas, esančių jame, ir šio dokumento bendros „šaltinės“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.

Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio raštinio „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laisvinti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadavimą, bet kokią išvestinio kopijavimo remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įtraukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

UAB „Slaugivita“

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279

[info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com), [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)



# TurnTable

SystemRoMedic™



TurnTable diskas gali būti naudojamas sėdimiems perkėlimams tarp vežimėlio ir lovos, tualetu ar kėdės/fotelio. Kad užtikrinti saugumą, patariama diską naudoti kartu su FlexiBelt/Easy belt diržais. Turn Table yra trijų dydžių su rankena ar be rankenos.

Sistema RoMedic yra eilė perkėlimų lengvinančių priemonių. Pagalbinės priemonės pasirinkimas priklauso nuo situacijos ir paciento funkcinių sugebėjimų bei poreikių.



#### Vaizdinis patikrinimas

Pastoviai tikrinkite paklodės būklę. Visada apžiūrėkite priemonę po skalbimo. Įsitinkite, kad siūlės ir medžiaga nesugadinti. Įsitinkite, kad medžiaga nesusidėvėjo ir neišdilo. Jei matosi susidėvėjimo žymės, produkto nebenaudokite.



#### Max:

5082: 135 kg/297 lbs  
5083: 135 kg/297 lbs  
5084: 250 kg/551 lbs  
5085: 135 kg/297 lbs

#### Visada perskaitykite instrukcijas

Visada perskaitykite priemonių, naudojamų perkėlimui, instrukcijas. Instrukcijas laikykite naudotojams prieinamoje vietoje. Nepalikite paciento be priežiūros perkėlimo situacijos metu.

#### Specialūs reikalavimai ir sąlygos

Atliekant perkėlimus su TurnTable, pacientas turi sugebėti atlikti šiuos veiksmus:

- išlaikyti savo kūno svorį, kol stovi (su pagalba)
- atsikelti ir išlaikyti balansą (su pagalba)
- suprasti nurodymus

#### Naudojimas



Padėkite TurnTable diską ant grindų prieš pacientą. Prieš keldami pacientą, uždėkite savo pėdos priekinę dalį ant disko, o kulną palikite ant grindų (žr. paveikslėlį). Sukite diską savo pėdos pagalba, kol pacientas bus reikiamoje pozicijoje. Užblokuokite diską savo pėdos pagalba, kaip aprašyta aukščiau ir pasodinkite pacientą.



Kai perkeliate pacientą nuo lovos ant vežimėlio, pastatykite vežimėlį kuo arčiau lovos krašto, kad sumažinti perkėlimo atstumą.



Kai perkeliate pacientą ant klozeto, pastatykite vežimėlį kuo arčiau klozeto, kad sumažinti perkėlimo atstumą. Pakelkite pacientą ir nuimkite/uždėkite kelnaites. Pageidautina, kad šiuos veiksmus atliktų du slaugytojai.



**Priežiūra:** valykite TurnTable su stipria oro ar vandens srove. Jei reikalinga, dezinfekuokite su 70% alkoholiu. Teflono purškiklis ar panašus produktas gali būti naudojamas, kad sutepti vidinę disko dalį, kad abi disko plokštės lengvai sukėtųsi.

**Dydžiai:**

5082 30 cm diametro

5084 45 cm diametro, su rankena

5083

5085

38 cm diametro

38 cm diametro, su rankena

**GARANTINIS TALONAS**

Įrengimo pavadinimas: \_\_\_\_\_

Modelis: \_\_\_\_\_

Serijos Nr.: \_\_\_\_\_

Pardavimo data: \_\_\_\_\_; PVM Sąskaitos-faktūros \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_

Pardavėjo pavardė \_\_\_\_\_ Parašas \_\_\_\_\_

**Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.**

**Garantija netaikoma:**

**Netinkamos priežiūros atveju :** Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

**Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju:** t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

**Modifikacijos atveju:** Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

**Kitais atvejais:** jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apiejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

**Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.**

**Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.**

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas \_\_\_\_\_

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

[info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com) [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)

1. Gedimas \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)