



# SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

## GAMINIO INSTRUKCIJA

### ČIUŽINIAI Hospital PLUS 14

**Gamintojas: Gumotex**



Autorių teisės šiose dokumente, įskaitant bei apribojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „švaizdos“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.

Be to, kas atskleidžia turinį, be išankstinio raštiško „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadrovimą, bet kokio išvestinio kopavimo sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įrašymą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spausdinti ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

**UAB „Slaugivita“**  
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279  
[info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com), [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)

- Čiužinio pagrindas pagamintas iš įvairių medžiagų derinio, užtikrinančio patogų gulėjimą. Nuimamas užvalkalas pagamintas iš aukštos kokybės medicininio audinio.
- Porolono medžiagos atitinka reikalavimus pagal Ūko-Tex standartą, I klasė – tinka vaikams iki trejų metų.
- Čiužinys turi būdingą kvapą, kuris po tam tikro laiko dingsta.
- Čiužinio medžiagos yra degios.
- Čiužinys gali būti suklijuotas iš kelių dalių.
- Nedideliai ugniai gesinti naudokite putų ar miltelių gesintuvus.
- Išmetamus čiužinius reikėtų pristatyti į savivaldybės atliekų šalinimo vietas, atskiros čiužinio dalys gali būti perdirbtos.
- Čiužinio įpakavimas pagamintas iš PELD medžiagos (mažo tankio polietileno) ir yra perdirbamas.

### **Priežiūros nurodymai**

Norėdami, kad čiužinys tarnautų pagal paskirtį, t.y. sveikam miegui ir atsipalaidavimui užtikrinti, prižiūrėdami jį laikykitės žemiau nurodytų principų:

- Dėkite čiužinį ant lovos rėmo, turinčio skersinius ar ant tvirto laidaus pagrindo su kiaurymėmis per visa paviršių. Idealiausia šį čiužinį naudoti ant GUMOTEX siūlomo lovos rėmo su skersiniais. Naudodami rekomenduojamą pagrindą ar lovos rėmą su skersiniais ir reguliariai apversdami čiužinį, prailginsite čiužinio tarnavimo laiką ir sumažinsite jo galimą deformaciją, kuri neturėtų viršyti 10 % viso čiužinio aukščio.
- Čiužinį galima naudoti nuo +5 °C iki +50 °C temperatūrų ribose.
- Saugokite čiužinį nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės, taip apsaugosite užvalkalo spalvą ir prailginsite čiužinio tarnavimo laiką.
- Čiužinio užvalkalas yra nuimamas ir jį galima plauti arba valyti sausu būdu (žiūrėkite užvalkalo priežiūros simbolius).
- Nuvilkdami užvalkalą ir vėl jį užvilkdami nesugadinkite užtrauktuko.
- Vėdinkite čiužinį mažiausiai 6 kartus per metus.

Čiužinys buvo kliniškai įvertintas sveikatos priežiūros teikėjo - **Fakultní nemocnice (Universitinėje ligoninėje) Olomouc** ir pagal galutinę medicininių priemonių klinikinio įvertinimo ataskaitą ir išbandančiojo asmens ataskaitą:

- čiužinys užtikrina pacientams didesnę komfortą. Jį galima naudoti prikaustytiems prie lovos pacientams, priežiūros namuose pacientams su minimalia pragulų atsiradimo rizika. Pacientams su šlapimo nelaikymu rekomenduojame užsisakyti čiužinį su Bravo užvalkalu, kurį galima skalbti iki 90 °C temperatūroje.

### **Garantijos sertifikatas**

GUMOTEX, a. s. suteikia 2 metų garantinį laikotarpį gaminiams: SOLO 12/14, MONO 12, OPTIMA 14, BASIC 1, KRISTYNA, GREEN VISCO, VISCO BASIC; 3 metų garantinį laikotarpį gaminiams: PLUS 14; 5 metų garantinį laikotarpį gaminiams: AIR LUX, LUX 14. Garantija neapima įprastinio naudojimo sukkelto čiužinio nusidėvėjimo. Medžiagos ar gamybos broko atveju pateikite pretenziją parduotuvėje, kurioje pirkote čiužinį. Reikalaudami grąžinti pinigus pateikite patvirtintą garantijos sertifikatą ir mokėjimo įrodymą. Be patvirtinančių čiužinio pirkimo dokumentų pretenzijos dėl čiužinio nebus priimamos.

**Gražinamas čiužinys turi būti prideramai išvalytas, turi būti pašalintas visas purvas ir jis turi būti higieniškas pagal bendruosius higienos principus. Čiužinys turi būti tinkamai supakuotas, kad jis nebūtų daugiau pažeistas ar neišpurvintų.**

Gamintojas: GUMOTEX, a. s., Mládežnická 3A, č. p. 3062; 690 75 Břeclav; Čekijos Respublika

Gaminys: **Poroloninis čiužinys pragulų profilaktikai su užvalkalu HOSPITAL OPTIMA 14**

Pardavimo data: PVM Sąskaita- faktūra SLS Nr.:

Pardavėjo antspaudas ir parašas:

**Pardavėjas: UAB "Slaugivita"**

**GARANTINIS TALONAS**

Įrengimo pavadinimas: \_\_\_\_\_

Modelis: \_\_\_\_\_

Serijos Nr.: \_\_\_\_\_

Pardavimo data: \_\_\_\_\_; PVM Sąskaitos-faktūros \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_

Pardavėjo pavardė \_\_\_\_\_ Parašas \_\_\_\_\_

**Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.**

**Garantija netaikoma:**

**Netinkamos priežiūros atveju :** Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

**Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju:** t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

**Modifikacijos atveju:** Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

**Kitais atvejais:** jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

**Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.**

**Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.**

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas \_\_\_\_\_

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

info@slaugivita.com www.slaugivita.com

**1. Gedimas**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**2. Gedimas**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Dėmesio: per garantinio aptarnavimo laikotarpį, remontuotinas prekes paims kurjeriai. Todėl, prašome supakuoti prekę (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti prekę mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.