



**SLAUGIVITA**  
Sprendimai, kurie atsiperka



**SLAUGIVITA**  
Sprendimai, kurie atsiperka

## GAMINIO INSTRUKCIJA

### ČIUŽINYS HOSPITAL OPTIMA OPTIMA14

**Gamintojas: Gumotex**

**GUMOTEX**



Autorių teisės šiame dokumente, įskaitanti be apribojimų visus dokumentus, failus, tekstą, vaizdus, grafiką, esantį jame, ir šio dokumento bendros „Išvaizdos“ autorių teisės priklauso UAB „Slaugivita“.

Be to, kas aiškiai nurodyta toliau, be išankstinio rašiško „Slaugivita“ leidimo draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar laikyti visą turinį ar jo dalį bet kokia forma, įskaitant kadrovimą, bet kokio išvestinio kūrinio sukūrimą remiantis šiuo dokumentu ir (arba) jo turiniu, jo įtraukimą į kitas svetaines, elektronines paieškos sistemas, perdavimą tretiesiems asmenims.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti naudojama informacijos tikslams, jei nurodomas informacijos šaltinis. Be to, galite kopijuoti ir spausdinti pranešimus spaudai ir kitus viešus dokumentus. Informacijos turinys negali būti keičiamas, o informacija turėtų būti naudojama taip, kad nepakenktų UAB „Slaugivita“ reputacijai.

**UAB „Slaugivita“**

**Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279**

**[info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com), [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)**

**El. p. [info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com)  
Tel. +370 41 522439  
Mob. +370 61608456**

**[www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)  
Adresas: Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai  
Įm. kodas: 145440368**

**PVM mokėtojo kodas: LT454403610  
A/S: LT98 7300 0100 8946 0228  
AB Swedbank, b/k 73000**

## ČIUŽINIO HOSPITAL OPTIMA INSTRUKCIJA

- Dvipusis profiliuotas čiužinys. Vidurinė čiužinio dalis sutvirtinta 6 cm putų poliuretano RE (tankis 60 kg/m<sup>3</sup>), viršutinė ir apatinė dalys - profiliuotas aukštos kokybės PUR putų poliuretanais, tankis 30 kg/m<sup>3</sup>. Nuimamas užvalkalas pagamintas iš aukštos kokybės medicininio audinio Bravo. Užvalkalo medžiaga yra nepralaidi skysčiams, pralaidi orui, lengvai valoma, antialergiška ir apsauganti nuo patalynės erkių atsiradimo. Užvalkalas su užtrauktuku. Užtrauktukas L formos, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. Užvalkalo kampai sutvirtinti papildomomis siūlėmis. Užvalkalo siūlės susiūtos.
- Porolono medžiagos atitinka reikalavimus pagal Öko-Tex standartą, I klasė – tinka vaikams iki trejų metų.
- Čiužinys turi būdingą kvapą, kuris po tam tikro laiko dingsta.
- Čiužinio medžiagos yra degios.
- Nedidėliai ugniai gesinti naudokite putų ar miltelių gesintuvus.
- Išmetamus čiužinius reikėtų pristatyti į savivaldybės atliekų šalinimo vietas, atskiro čiužinio dalys gali būti perdirbtos.
- Čiužinio įpakavimas pagamintas iš PELD medžiagos (mažo tankio polietileno) ir yra perdirbamas.

### Priežiūros nurodymai

Norėdami, kad čiužinys tarnautų pagal paskirtį, t.y. sveikam miegui ir atsipalaidavimui užtikrinti, prižiūrėdami jį laikykitės žemiau nurodytų principų:

- **Dėkite čiužinį ant lovos rėmo, turinčio skersinius ar ant tvirto laidaus pagrindo su kiaurymėmis per visa paviršių. Idealiausia šį čiužinį naudoti ant GUMOTEX siūlomo lovos rėmo su skersiniais. Naudodami rekomenduojamą pagrindą ar lovos rėmą su skersiniais ir reguliariai apversdami čiužinį, prailginsite čiužinio tarnavimo laiką ir sumažinsite jo galimą deformaciją, kuri neturėtų viršyti 10 % viso čiužinio aukščio.**
- Čiužinį galima naudoti nuo +5 °C iki +50 °C temperatūrų ribose.
- Saugokite čiužinį nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės, taip apsaugosite užvalkalo spalvą ir prailginsite čiužinio tarnavimo laiką.
- Čiužinio užvalkalas yra nuimamas ir jį galima plauti arba valyti sausu būdu (žiūrėkite užvalkalo priežiūros simbolius).
- Nuvilkdami užvalkalą ir vėl jį užvilkdami nesugadinkite užtrauktuko.
- Vėdinkite čiužinį mažiausiai 6 kartus per metus.

### Čiužinio užvalkalo Bravo priežiūros instrukcija

#### • Bendra informacija

Valymui, dezinfekavimui ir plovimui nereikia naudoti chemines medžiagas, kurių sudėtyje yra formaldehido arba fenolio! Didžiausia leistina chloro dezinfektantų (chloramino) koncentracija yra 0,5%. Po dezinfekavimo paviršių reikia nuvalyti švariu vandeniu ir tinkamai nusausinti.

#### • Valymas

Užterštas paviršius valomas minkšta drėgna šluoste, sudrėkinta vandeniu, kuriame yra valymo priemonė. Užteršimas gali būti pašalintas priemone su alkoholiu (metilo alkoholis) ir tada paviršius nuplaunamas karštu vandeniu ir neutralia valymo priemone.

#### • Dezinfekcija

Užvalkalo dezinfekcija gali būti atliekama tradicine neutralia dezinfekavimo priemone (pvz., chloroxilenolu 4,9 g/100 g vandens, 2-propanolio tirpalu 50 ml/m<sup>3</sup> vandens arba 0,5% chloramino tirpalu). Po dezinfekavimo, visada paviršių reikia nuvalyti švariu vandeniu ir tinkamai nusausinti.

#### • Skalbimas

Užvalkalą galima skalbti temperatūroje iki 95 °C, naudojant įprastus ploviklius. Mes nerekomenduojame naudoti abrazyvinių skalbimo priemonių (milteliai ir pan.) ir skalbinių minkštiklių.

#### • Džiovinimas

Ištiesti ir leisti tinkamai išdžiūti prieš sulankstant. Džiovininti galima ant pakabos, centrifugoje arba nuspaudžiant, temperatūroje iki 30 °C.

#### • Lyginimas

**Užvalkalus lyginti draudžiama!**

**Garantijos sertifikatas**

GUMOTEX Matrace, s.r.o. suteikia 2 metų garantinį laikotarpį gaminiams HOSPITAL OPTIMA. Garantija neapima įprastinio naudojimo sukkelto čiužinio nusidėvėjimo. Medžiagos ar gamybos broko atveju pateikite pretenziją parduotuvėje, kurioje pirkote čiužinį. Reikalaudami grąžinti pinigus pateikite patvirtintą garantijos sertifikatą ir mokėjimo įrodymą. Be patvirtinančių čiužinio pirkimo dokumentų pretenzijos dėl čiužinio nebus priimamos.

Gamintojas: GUMOTEX Matrace, s.r.o., Mládežnická 3A, č. p. 3062; 690 75 Břeclav; Čekijos Respublika

Pardavimo data: **2017.11.30** Sąskaitos **SLS** Nr.:      Pardavėjo antspaudas ir parašas:

**Pardavėjas: UAB "Slaugivita"**

**GARANTINIS TALONAS**

Įrengimo pavadinimas: \_\_\_\_\_

Modelis: \_\_\_\_\_

Serijos Nr.: \_\_\_\_\_

Pardavimo data: \_\_\_\_\_; PVM Sąskaitos-faktūros \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_

Pardavėjo pavardė \_\_\_\_\_ Parašas \_\_\_\_\_

**Šiam parduodamam gaminiui suteikiama 12 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.**

**Garantija netaikoma:**

**Netinkamos priežiūros atveju :** Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

**Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju:** t.y. kai gaminyje (įrenginyje) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

**Modifikacijos atveju:** Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

**Kitais atvejais:** jei gaminyje (įrenginyje) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apšiejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

**Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" nepriima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims.**

**Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.**

**Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui. Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.**

Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:

Pirkėjo parašas \_\_\_\_\_

Garantinis aptarnavimas tel.: +370 41 540204

[info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com) [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)

1. Gedimas \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2. Gedimas \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)