



# Slaugivita

**GAMINIO INSTRUKCIJA**

**Gilios kompresijos liemenė  
21545-21601**



**Gamintojas: ROMPA**



*UAB "Slaugivita"*

*Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279*

*[info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com), [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)*

## **1. Gaminio pavadinimas**

Gilios kompresijos liemenė

## **2. Gaminio kodas**

21600 XXS

21601 XS

21552 S

21545 M

21556 L

21564 XL

## **3. Spalva**

Spalvos gali skirtis.

## **4. Trumpas aprašymas**

Suteikia pacientui stabilumo jausmą ir propriocepcinę stimuliaciją. Pagaminta iš orui laidaus, neopreno, be latekso, palaiko natūralią kūno temperatūrą. Suteikia gilią kompresiją ir padeda palaikyti kūno temperatūrą.

## **5. Komplekta sudaro:**

1 x gilios kompresijos liemenė

## **6. Snoezelen® stimuliacijos**

Lytėjimas

Propriocepcija

## **7. Geriausia naudoti**

Suteikia pacientui stabilumo jausmą ir propriocepcinę stimuliaciją. Pagaminta iš orui laidaus, neopreno, be latekso, palaiko natūralią kūno temperatūrą. Suteikia gilią kompresiją ir padeda palaikyti kūno temperatūrą. Turi 2 šoninius ir 2 pečių užsegimus. Spalvos gali skirtis. Išskalbkite prieš naudojimą.

## **8. Suderinami ROMPA® gaminiai**

Apsilankykite [www.rompa.com](http://www.rompa.com) ir išsirinkite daugiau panašių produktų.

## **9. Naudojimo pradžia**

- Pasirinkite tinkamo dydžio liemenę pagal kliento matmenis.
- Išimkite iš maišo ir atsekite „Velcro®“ tvirtinimo užsegimus.

- Tvirtinkite aplink klientą (pvz., maukite per galvą) ir, jei reikia, sureguliuokite užsegimus, kad maloniai apspaustu.
- Po panaudojimo maišą laikykite saugioje, nepasiekiamoje vietoje.

## **10. Detalus aprašymas**

Suteikia pacientui stabilumo jausmą ir proprioreceptinę stimuliaciją. Padeda pagerinti kūno suvokimą. Pagaminta iš orui laidaus, neopreno, be latekso, palaiko natūralią kūno temperatūrą. Suteikia gilią kompresiją ir padeda palaikyti kūno temperatūrą. Turi 2 šoninius ir 2 pečių užsegimus. Spalvos gali skirtis. Išskalbkite prieš naudojimą.

## **11. Sauga**

- Visuomet prižiūrėkite produkto naudojimą.
- Šis produktas nėra žaislas ir niekada neturėtų būti traktuojamas kaip žaislas.
- Laikykite atokiau nuo karščio, įskaitant liepsną, šildytuvus, degtukus, cigaretes ir kt.

## **12. Techninės specifikacijos**

Perforuotas neoprenas, be latekso, „Velcro®“ tvirtinimai

Dydis:

XXS	30.5L x 51cmW
XS	35.5L x 61cmW
S	43L x 76cmW
M	51L x 91cmW
L	58L x 106.5cmW
XL	66L x 122cmW

## **13. Montavimas**

- Išimkite iš pakuotės.
- Užsekite tvirtai, bet patogiai.
- Du segimai šonuose ir 2 užsegimai ant pečių.
- Prieš uždėdami liemenės viršutinę dalį virš kliento galvos, atsekite abu šoninius užsegimus ir užfiksuokite abu pečių užsegimus. Jei negalite uždėti liemenės dėl pečių užsegimų, galite atsegti vieną pečių užsegimo pusę ir uždėti liemenę iš šono.
- Pritvirtinkite visus užsegimus ir sureguliuokite persidengimo apimtį šonuose ir pečių užsegimuose, kad sureguliuotumėte slėgį, kurį patirs klientas. Tinkamai sureguliuavę, turėtumėte sugebėti suspausti audinį ir šiek tiek atitraukti nuo kliento kūno. Jei tai pasirodys per sunku, liemenė pritvirtinta per stipriai. Jei audinį per daug lengvai atitraukti nuo kūno, gali tekti šiek tiek tvirčiau užsegti viršutinę dalį.

#### **14. Priežiūra**

Prieš skalbdami, užsekite Velcro.

Plaukite šaltu vandeniu ir leiskite natūraliai išdžiūti.

#### **15. Trikčių diagnostika**

*Netaikoma.*

Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš [www.rompa.com](http://www.rompa.com)

Tikimės, kad mūsų instrukcijos buvo naudingos. Jeigu turite bet kokių pasiūlymų, kaip patobulinti instrukcijas, mielai laukiame jūsų komentarų - susisiekite su mumis el. paštu [producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)